

AAN- EN UITTREKKEN UITGELEGD: OOGBESCHERMING IN EEN ZORGOMGEVING

Verschillende werknemers dragen nu oogbescherming voor eenmalig gebruik om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Oogbescherming vormt een barrière die infectieuze stoffen uit het oog houdt en zo het risico op blootstelling aan het nieuwe coronavirus verkleint. Oogbescherming wordt gebruikt in combinatie met andere persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zoals handschoenen, schorten en gezichtsmaskers of ademhalingsstoestellen en moet net als alle PBM zorgvuldig opgezet en afgezet worden.

PBM voor oogbescherming¹ omvatten;

Veiligheidsbrillen met indirecte ventilatie



Volgens het CDC/NIOSH: * Goed passende veiligheidsbrillen met indirecte ventilatie en een condenswerende coating van de fabrikant bieden de betrouwbaarste praktische oogbescherming tegen spatten, sprays en ademhalingsdruppels. Veel soorten veiligheidsbrillen passen goed en met minimale kieren over brillen op sterkte. Veiligheidsbrillen moeten, vooral bij de ooghoeken en over de wenkbrauwen, nauw aansluiten om goed te werken. Hoewel veiligheidsbrillen de ogen goed afdekken, beschermen ze de rest van het gezicht niet tegen spatten of sprays.

** Veiligheidsbrillen met directe ventilatie kunnen spatten of sprays doorlaten; gebruik daarom liever veiligheidsbrillen met indirecte ventilatie of zonder ventilatie als bescherming tegen besmetting.**

Gelaatsschermen



Volgens het CDC/NIOSH: "Vaak worden gelaatsschermen als alternatief voor veiligheidsbrillen gebruikt.** In tegenstelling tot veiligheidsbrillen beschermen gelaatsschermen ook de rest van het gezicht. Om de ogen en het gezicht beter te beschermen tegen spatten en sprays moeten gelaatsschermen voorzien zijn van een kroon en kinbescherming en omhullen ze het gezicht tot aan de punt van het oor. Dit minimaliseert het risico dat er een spat achter het scherm langs in het oog terecht komt. Wegwerpgelaatsmaskers van lichtgewicht films voor zorgpersoneel die op een chirurgisch masker bevestigd kunnen worden of los om het gezicht zitten, gelden niet als optimale bescherming.

*** Bij blootstelling aan chemicaliën of in een industriële omgeving moeten gelaatsmaskers gebruikt worden als aanvulling op veiligheidsbrillen en niet als vervanging daarvan (ANSI Z87.1-2003 Praktijk voor professionele en educatieve oog- en gezichtsbescherming)."*

Gelaatsbedekkende ademhalingsmaskers



Volgens het CDC/NIOSH: "Gelaatsbedekkende ademhalingsmaskers van elastomeren en luchtzuiverende ademhalingsstoestellen (PAPR's) worden ontworpen en gebruikt voor ademhalingsbescherming, maar dankzij hun ontwerp bieden ze tevens uiterst doeltreffende oogbescherming. Selectie van dit type PBM volgt als uit evaluatie blijkt dat er in een besmettelijke situatie een gevaar is voor de luchtwegen. Als bijkomstig voordeel beschermen ze ook de ogen optimaal."

AAN- EN UITTREKKEN UITGELEGD: OOGBESCHERMING IN EEN ZORGOMGEVING

Bekijk hieronder onze praktische tips om oogbescherming goed op- en af te zetten*²

Opzetten



Was uw handen




Haal de oogbescherming met schoongewassen handen uit de verpakking



Plaats de veiligheidsbril voor de ogen en zet hem met de bandjes/hoofdband vast



Trek aan zodat de veiligheidsbril goed aansluit (niet te strak)

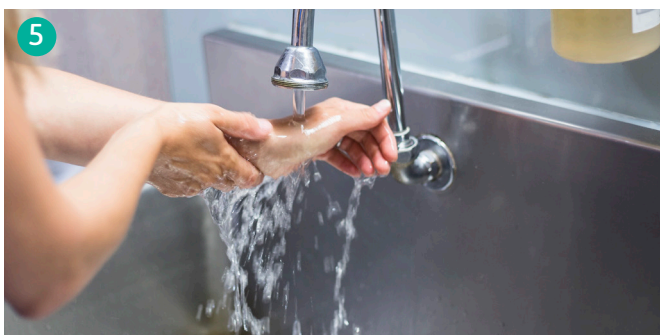

Was uw handen voordat u uw handschoenen aantrekt

Oogbescherming afzetten/afdoen

1. Ga met ongehandschoende handen te werk
2. Pak de bandjes of hoofdband vast en trek de veiligheidsbril/het gelaatsscherm van het gezicht
3. Weggooiden in de daarvoor bestemde afvalbak

*Houdt u zich aan de door de zorginstelling opgegeven volgorde voor het aan- en uittrekken van PBM.

1. <https://www.cdc.gov/niosh/topics/eye/eye-infectious.html>, 2. <https://www.cdc.gov/hai/pdfs/ppe/PPEslides6-29-04.pdf>

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. © 2020 Alle rechten voorbehouden.