

GUIDA PER PROFESSIONISTI DENTALI PER INDOSSARE E TOGLIERE I DPI

Secondo i CDC, le professioni ad alto rischio sono quelle con potenziali esposizioni a fonti note o sospette di COVID-19. Questa categoria comprende i professionisti dentali che eseguono procedure che generano aerosol (per es. procedure di induzione della tosse, alcune procedure dentali, esami o raccolta invasiva di campioni). È importante indossare DPI per proteggere se stessi e gli altri dal COVID-19. Seguire le fasi riportate di seguito per indossare e togliere i DPI. Maggiori informazioni sull'uso dei DPI durante le cure cliniche sono disponibili all'indirizzo <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/dental-settings.html>.

Per una protezione ottimale ed evitare la contaminazione incrociata nell'indossare e togliere i DPI, seguire questi passaggi:

INDOSSARE I DPI

1. **Eseguire l'igiene delle mani**
2. **Indumento di protezione:** indossare prima il camice. In caso di utilizzo di camice con chiusura sul retro, potrebbe essere utile l'assistenza di un secondo operatore.
3. **Respiratore:** continuare applicando il respiratore. Stringere il cinturino per una vestibilità comoda e sicura.
4. **Protezione degli occhi:** posizionare gli occhiali o lo schermo facciale sopra il cinturino della mascherina e far sì che i lacci elastici aderiscano correttamente alla testa.
5. **Eseguire l'igiene delle mani prima di mettere i guanti.**
6. **Guanti:** calzare i guanti come ultima cosa, allungandoli con cura sopra il polsino del camice o l'indumento indossato, in modo da coprire il polso della mano e limitare l'esposizione.



TOGLIERE I DPI

1. **Togliere i guanti** facendo attenzione a evitare ulteriori contaminazioni delle mani. I guanti possono essere tolti ricorrendo a più di una tecnica: l'obiettivo principale resta non toccare la parte esterna contaminata. Smaltire in apposito contenitore sigillato per rifiuti.
2. **Togliere il camice** Slacciare o sbottonare (A) Togliere cominciando dalle spalle (B) Allontanare il camice dal corpo con attenzione (C) Arrotolare il camice (D) Smaltire in apposito contenitore sigillato per rifiuti.
3. **Uscire dalla stanza della visita ed eseguire l'igiene delle mani.**
4. **Togliere gli occhiali e lo schermo facciale** afferrando il cinturino, tirandolo verso l'alto e allontanandolo dalla testa. Non toccare la parte anteriore degli occhiali né dello schermo facciale. Smaltire in apposito contenitore sigillato per rifiuti oppure preparare la pulizia/il ritrattamento.
5. **Togliere e smaltire il respiratore** senza toccare la parte anteriore. Togliere il cinturino inferiore toccando solo quello e portarlo con attenzione sopra la testa. Afferrare il cinturino superiore e portarlo con attenzione sopra la testa, quindi allontanare il respiratore dal volto. Smaltire il respiratore in apposito contenitore sigillato per rifiuti.
6. **Eseguire l'igiene della mano** dopo avere tolto il respiratore.



CONSIGLI IMPORTANTI DA RICORDARE:

- I DPI devono essere indossati correttamente prima di accedere nell'area in cui si trova il paziente.
- I DPI devono restare in posizione ed essere indossati correttamente per tutta la durata del lavoro.
- I DPI non devono essere regolati (per es. rimettersi il camice, aggiustare respiratore/mascherina, ecc.) durante la visita al paziente.
- I DPI devono essere tolti lentamente e deliberatamente, rispettando una sequenza che prevenga un'eventuale autocontaminazione.
- Gestire il trattamento dei rifiuti in modo sicuro. Trattare i rifiuti contaminati con sangue, fluidi corporei, secrezioni ed escrezioni come rifiuti sanitari, in conformità alle normative locali.

IGIENE DELLE MANI

Prima di indossare e togliere i DPI per la cura di qualsiasi paziente, è necessario eseguire una corretta igiene delle mani.

Lavare le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi o disinfettarle con un gel a base d'alcol (>60%) in conformità alla procedura prevista dalla propria organizzazione.

➔ Per maggiori informazioni su controllo e prevenzione dell'infezione da COVID-19: www.ansell.com/us/en/the-new-coronavirus

Esclusione della responsabilità: data la novità di questo coronavirus, le raccomandazioni delle fonti di riferimento sono, necessariamente, provvisorie e consultive, basandosi sulle attuali conoscenze della situazione. Verificare sempre la conformità alle normative delle autorità pubbliche locali riguardo a selezione e utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per combattere la pandemia COVID-19.

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. © 2020 Tutti i diritti riservati.