

GIDS VOOR AAN- EN UITTREKKEN VAN PBM VOOR TANDARTSEN

Volgens de CDC zijn risicovolle beroepen de beroepen waar mensen mogelijk worden blootgesteld aan bekende of vermoedelijke bronnen van COVID-19. Werknemers die in deze categorie vallen, omvatten tandheelkundigen die procedures uitvoeren waarbij aerosols ontstaan (bijvoorbeeld hoestopwekkende procedures, sommige tandheelkundige procedures, onderzoeken of invasieve staalname). Het is belangrijk om PBM te dragen om uzelf en anderen tegen COVID-19 te beschermen. Volg de stappen voor het aan- en uittrekken hieronder. Aanvullende informatie over PBM voor gebruik tijdens het verlenen van klinische zorg vindt u op <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/dental-settings.html>.

Volg deze stappen voor optimale bescherming en het voorkomen van kruisbesmetting tijdens het aan- en uittrekken:

AANTREKKEN	UITTREKKEN
Was uw handen Beschermende kleding: trek eerst de jas aan. Wanneer u een jas gebruikt die aan de achterkant dichtgaat, vraagt u een tweede persoon om hulp bij het dichtmaken van de jas. Ademhalingsmasker: ga verder met het ademhalingsmasker. Trek de bandjes aan zodat het masker veilig en comfortabel zit. Oogbescherming: plaats een veiligheidsbril of gezichtsscherm over de bandjes van het masker en zorg ervoor dat het elastiek goed op het hoofd aansluit. Was uw handen voordat u de handschoenen aantrekt. Handschoenen: trek de handschoenen als laatste aan, zorg ervoor dat de handschoenen over de manchet van de jas is getrokken om de pols te bedekken en blootstelling te beperken.	Trek de handschoenen uit en wees voorzichtig om besmetting van uw handen te voorkomen. Er zijn meerdere technieken voor het uittrekken van handschoenen, maar het aanraken van de besmette buitenzijde moet altijd worden vermeden. Gooi de handschoenen weg in een afgesloten afvalbak. Trek de jas uit. Maak alle knopen los (A) Reik met uw handen naar uw schouders (B) Trek de jas voorzichtig omlaag en weg van het lichaam (C) Rol de jas omlaag (D) Gooi de jas weg in een afgesloten afvalbak. Verlaat de onderzoekskamer en was uw handen. Verwijder het gezichtsscherm of de veiligheidsbril door het bandje omhoog en weg van het hoofd te trekken. Raak de voorzijde van het gezichtsschild of de bril niet aan. Gooi weg in een afgesloten afvalbak of bereid voor op reiniging/herverwerking. Verwijder het ademhalingsmasker en gooi dit weg zonder de voorzijde van het masker aan te raken. Verwijder het onderste bandje door alleen het bandje aan te raken en deze voorzichtig over uw hoofd te halen. Pak het bovenste bandje beet en trek deze voorzichtig over het hoofd. Trek het ademhalingsmasker vervolgens van uw gezicht weg. Gooi het ademhalingsmasker weg in een afgesloten afvalbak. Was uw handen na het verwijderen van het ademhalingsmasker.



BELANGRIJKE TIPS

- PBM moeten op de juiste manier worden aangetrokken voordat u het patiëntgebied betreedt.
- PBM moeten op hun plaats blijven zitten en op de juiste manier worden gedragen gedurende het werk.
- PBM mogen niet worden aangepast (bijvoorbeeld jas opnieuw dichtknopen, ademhalingsmasker verplaatsen) tijdens de zorg voor de patiënt.
- PBM moeten langzaam en zorgvuldig in de juiste volgorde worden verwijderd om te voorkomen dat u besmet raakt.
- Zorg ervoor dat er veilig met afval wordt omgesprongen. Behandel afval dat in contact is gekomen met bloed, lichaamsvloeistoffen en uitscheidingen als medisch afval in overeenstemming met lokale regelgeving.

HANDHYGIËNE

Vóór het aantrekken van PBM voor het verzorgen van welke patiënt dan ook en na het uittrekken van PBM moet u uw handen op de juiste manier reinigen. Was uw handen met water en zeep gedurende minimaal 20 seconden of desinfecteer uw handen met een alcoholgel (>60%) in overeenstemming met de aanbevolen procedure in uw instelling.

➔ Ga voor meer informatie over infectiepreventie en -beheersing in verband met COVID-19 naar www.ansell.com/us/en/the-new-coronavirus

Let op: omdat het coronavirus een nieuw virus is, zijn de aanbevelingen van de geraadpleegde bronnen tijdelijk en bedoeld als advies en gebaseerd op de huidige kennis van de situatie. Zorg er altijd voor dat u de voorschriften van lokale volksgezondheidsinstanties opvolgt voor het zuinig omspringen met, het gebruiken en het kiezen van PBM tegen het coronavirus.

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. © 2020 Alle rechten voorbehouden.