


ИНСТРУКЦИЯ ПО НАДЕВАНИЮ И СНЯТИЮ СИЗ ДЛЯ СТОМАТОЛОГОВ

Согласно Центру по контролю и профилактике заболеваемости США (CDC) работами высокого риска являются работы, выполнение которых сопряжено с установленным или подозреваемыми источниками COVID-19. К работникам этой категории относятся стоматологи, осуществляющие процедуры с образованием аэрозоля (например, вызывающие кашель процедуры, некоторые стоматологические процедуры, осмотр или инвазивное взятие образца). Для защиты себя и окружающих от COVID-19 следует носить СИЗ. Следуйте приведенным ниже инструкциям по надеванию и снятию СИЗ. Для получения дополнительной информации об использовании СИЗ при оказании медицинской помощи см. веб-сайт <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/dental-settings.html>.

Для обеспечения оптимальной защиты и профилактики перекрестного заражения во время надевания и снятия СИЗ выполните приведенные ниже действия.

НАДЕВАНИЕ

1. **Выполните гигиеническую обработку рук.**
2. **Защитная одежда:** сначала наденьте халат. При использовании халата с застежками сзади для его застегивания необходима помощь второго оператора.
3. **Респиратор:** далее приступайте к надеванию респиратора. Затяните лямки, чтобы обеспечить надежное и удобное прилегание.
4. **Средства защиты глаз:** наденьте очки или лицевой щиток поверх лямок маски и убедитесь, что эластичные лямки плотно охватывают голову.
5. **Перед надеванием перчаток выполните гигиеническую обработку рук.**
6. **Перчатки:** надевайте перчатки в последнюю очередь, натягивая перчатки поверх манжеты халата или защитной одежды, чтобы покрыть запястье и ограничить контакт.

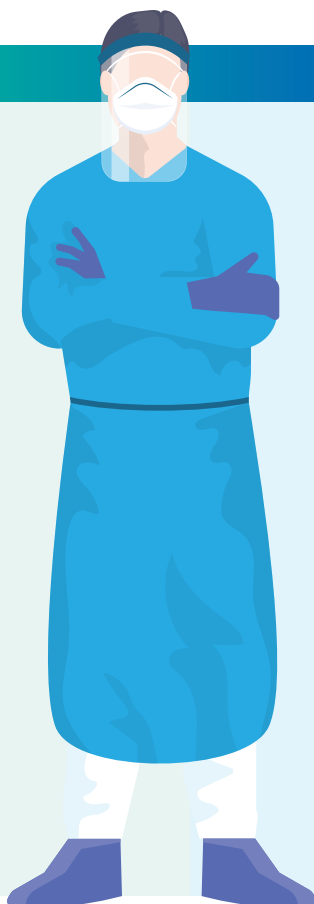

СНЯТИЕ

1. **Снимите перчатки**, стараясь не допустить дополнительной контаминации рук. Снимать перчатки можно несколькими способами, основная цель которых — не допустить касания внешней контаминированной поверхности. Поместите перчатки в герметичный мусорный контейнер.
2. **Снимите халат.** Развяжите лямки или расстегните пуговицы. (А) Возьмитесь за плечи. (Б) Аккуратно стяните халат вниз с тела. (В) Скатайте халат. (Г) Поместите халат в герметичный мусорный контейнер.
3. **Выйдите из смотрового кабинета и выполните гигиеническую обработку рук.**
4. **Снимите лицевой щиток или очки**, взявшись за лямку и сняв ее с головы по направлению вверх. Не касайтесь передней поверхности лицевого щитка или очков. Поместите изделие в герметичный мусорный контейнер или подготовьте его к очистке/повторной обработке.
5. **Снимите и выбросьте респиратор**, не касаясь его передней поверхности. Снимите нижнюю лямку, касаясь только лямки, и аккуратно снимите ее поверх головы. Возьмитесь за верхнюю лямку и снимите ее поверх головы, а затем отведите респиратор от лица. Поместите респиратор в герметичный мусорный контейнер.
6. **После снятия респиратора** выполните гигиеническую обработку рук.



ПАМЯТКА С ВАЖНЫМИ СОВЕТАМИ

- Прежде чем входить в помещение с пациентом, необходимо правильно надеть СИЗ.
- СИЗ следует носить должным образом на всем протяжении оказания медицинской помощи.
- Во время оказания медицинской помощи пациентам СИЗ не следует поправлять (например, повторно завязывать халат, регулировать респиратор или маску для лица).
- СИЗ следует снимать медленно и точно в последовательности, которая предотвращает самозаражение.
- Обеспечьте безопасное обращение с отходами. Обращайтесь с отходами, загрязненными кровью, жидкостями организма, выделениями и экскрементами, как с медицинскими отходами в соответствии с местными нормативами.

ГИГИЕНА РУК

Перед надеванием и после снятия СИЗ для оказания помощи пациенту следует выполнять надлежащую гигиеническую обработку рук. Мойте руки водой с мылом в течение не менее 20 секунд или дезинфицируйте руки гелем с содержанием спирта > 60 % в соответствии с порядком, установленным в вашем учреждении.

Для получения дополнительной информации о профилактике инфекций и контроле распространения COVID-19 см. веб-сайт www.ansell.com/us/en/the-new-coronavirus

Примечание: учитывая недавнее появление данного коронавируса, рекомендации, предоставленные в указанных источниках, носят временный и рекомендательный характер и основаны на текущих знаниях о ситуации. Для того чтобы противостоять пандемии COVID-19, всегда следите за соблюдением нормативно-правовых требований, установленных местными органами общественного здравоохранения, касающихся использования и выбора СИЗ.

Ansell, ® и ™ являются товарными знаками компании Ansell Limited или одного из её филиалов. © 2020 г. Все права защищены.