

AN- UND AUSZIEHANLEITUNG FÜR ZAHNMEDIZINISCHE BERUFE

Laut CDC gelten Arbeiten als hochriskant, die eine mögliche Gefährdung durch einen bestätigten oder angenommenen COVID-19-Fall bergen. In diese Kategorie fällt auch zahnmedizinisches Personal, das Aerosole generierende Verfahren durchführt (z.B. Induktion von Husten, einige zahnmedizinische Verfahren, Untersuchungen oder invasive Entnahme von Abstrichen). Es ist äußerst wichtig, PSA zum Schutz der eigenen Person und anderer Personen vor COVID-19 zu tragen. Befolgen Sie als beste Praxis unsere nachstehenden Tipps für das An- und Ausziehen. Weitere Informationen über die Verwendung von PSA während der klinischen Versorgung finden Sie unter: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/dental-settings.html>.

Befolgen Sie für einen optimalen Schutz und zur Vermeidung einer Kreuzkontamination während des An- und Ausziehens diese Schritte:

ANZIEHEN	AUSZIEHEN
Waschen und desinfizieren Sie die Hände Schutzkleidung: Ziehen Sie zuerst den Kittel an. Falls es sich um einen Kittel mit einem Rückenverschluss handelt, muss ein Assistent den Kittel schließen. Atemschutz: Ziehen Sie nun die Atemschutzmaske an. Stellen Sie mit den Bändern einen festen, komfortablen Sitz ein. Augenschutz: Positionieren Sie die Schutzbrille oder das Gesichtsvision über den Maskenbändern, und ziehen Sie das Gummiband über den Kopf Waschen Sie vor dem Anziehen der Handschuhe Ihre Hände. Handschuhe: Ziehen Sie als letzten Schritt die Handschuhe an. Achten Sie darauf, dass die Handschuhmanschetten das Handgelenk am Bund des Kittels oder der Kleidung abdecken und somit eine Exposition einschränken.	Achten Sie beim Ausziehen der Handschuhe sorgfältig darauf, die Hände nicht zusätzlich zu kontaminieren. Handschuhe können mit mehr als einer Technik ausgezogen werden. Das primäre Ziel aller Techniken ist aber, nicht die kontaminierte Außenseite der Handschuhe zu berühren. Entsorgen Sie die Handschuhe in einem versiegelten Abfallbehälter. Ziehen Sie den Kittel aus. Lösen oder öffnen Sie alle Knöpfe (A). Greifen Sie die Schultern. (B) Ziehen Sie den Kittel vorsichtig abwärts. (C) Rollen Sie den Kittel abwärts. (D) Entsorgen Sie den Kittel in einem versiegelten Abfallbehälter. Verlassen Sie das Untersuchungszimmer, und waschen und desinfizieren Sie Ihre Hände. Greifen Sie das Band der Schutzbrille/des Gesichtsvisioners, und ziehen Sie ihn über den Kopf aus. Berühren Sie nicht die Vorderseite des Gesichtsvisioners oder der Schutzbrille. Entsorgen Sie den Augen-/Gesichtsschutz in einem versiegelten Abfallbehälter, oder bereiten Sie ihn für die Reinigung/Aufbereitung vor. Entfernen und entsorgen Sie die Atemschutzmaske ohne diese an der Vorderseite zu berühren. Greifen Sie nur das untere Band, und ziehen Sie es vorsichtig über den Kopf. Greifen Sie das obere Band, und ziehen Sie es sorgfältig über den Kopf. Nehmen Sie dann die Atemschutzmaske ab. Entsorgen Sie die Atemschutzmaske in einem versiegelten Abfallbehälter. Waschen und desinfizieren Sie nach dem Ausziehen der Maske Ihre Hände.



WICHTIGE TIPPS ZUR STÄNDIGEN ERINNERUNG

- PSA muss vor dem Betreten des Patientenbereichs sorgfältig angezogen werden.
- PSA muss einen sicheren Sitz haben und während der gesamten Tätigkeitsdauer ordnungsgemäß getragen werden.
- PSA darf während der Patientenversorgung nicht nachträglich gerichtet werden (d.h. erneutes Schließen des Kittels, Korrektur des Sitzes der Atemschutz-/Gesichtsmaske).
- PSA muss langsam und bewusst in einer Reihenfolge ausgezogen werden, die eine Selbstkontamination vermeidet.
- PSA muss sicher und gesetzeskonform entsorgt werden. Mit Blut, Sekreten, Exkreten und anderen Körperflüssigkeiten kontaminierter Abfall muss als medizinischer Sondermüll gemäß der lokalen Gesetzgebung entsorgt werden.

HÄNDEHYGIENE

Vor dem Anziehen und nach dem Ausziehen von PSA für die Patientenversorgung müssen die Hände gewaschen und/oder desinfiziert werden. Waschen Sie die Hände für mindestens 20 Sekunden mit Wasser und Seife, oder desinfizieren Sie die Hände mit einem alkoholhaltigen Gel (> 60 %) unter Einhaltung des von Ihrer Organisation empfohlenen Verfahrens.

➔ Weitere Informationen über die Kontrolle und Prävention von COVID-19-Infektionen: www.Ansell.com/us/en/the-new-coronavirus

Hinweis: Angesichts der Neuartigkeit dieses Coronavirus gelten die Empfehlungen aus den Quellenangaben ausschließlich als vorübergehende Empfehlungen auf der Grundlage des aktuellen Wissensstandes. Befolgen Sie immer die von den örtlichen Gesundheitsbehörden vorgeschriebenen Verwendungs- und Auswahlrichtlinien für persönliche Schutzausrüstung (PSA) zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie.

Ansell, ® und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. © 2020 Alle Rechte vorbehalten.