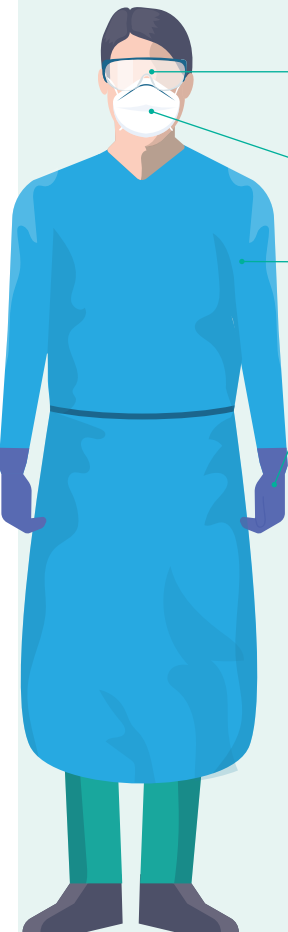
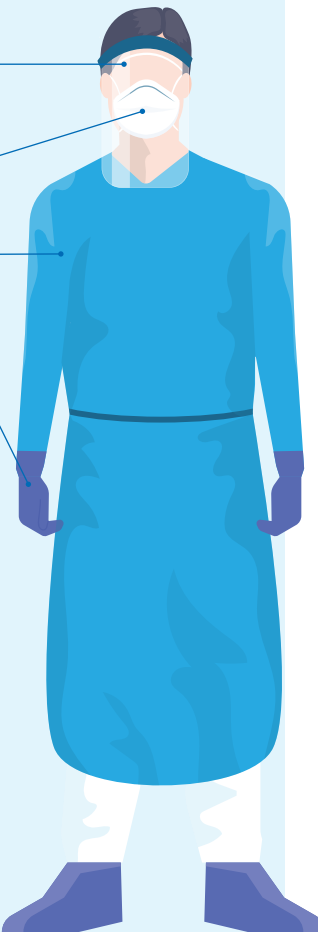


VIZUÁLNÍ PRŮVODCE BEZPEČNÝM POUŽÍVÁNÍM OOP PRO ZUBNÍ LÉKAŘE

CDC uvádí, že vysoce riziková pracovní místa jsou ta, u kterých hrozí nebezpečí expozice známým nebo předpokládaným zdrojům COVID-19. Mezi pracovníky v této kategorii patří zubní lékaři provádějící postupy vytvářející aerosol (např. postupy, které vyvolávají kašel, některé zubní postupy, vyšetření nebo invazivní odběr vzorků). Abyste chránili sebe i ostatní před COVID-19, je důležité používat OOP.

Další informace o použití OOP během klinické péče naleznete na adrese <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/dental-settings.html>.

BĚŽNÝ KONTAKT S PACIENTY	POSTUPY VYTVÁŘEJÍCÍ AEROSOL NEBO VYSOCE RIZIKOVÉ OBLASTI
 - Ochrana očí, ochranné brýle na základě posouzení rizik - N95, FFP2 nebo respirátor s vyšší úrovní ochrany - Jednorázové / opakovaně použitelné pláště - Jednorázové rukavice	 - Ochrana očí, ochranný štít, ochranné brýle nebo hledí - N95, FFP2 nebo respirátor s vyšší úrovní ochrany - Jednorázové / opakovaně použitelné pláště s dlouhým rukávem - Jednorázové rukavice

DŮLEŽITÉ BODY K ZAPAMATOVÁNÍ:

- OOP musí být nasazeny před vstupem do oblastí, kde se nachází pacient, a po celou dobu péče o pacienta musí zůstat na svém místě.
- Vždy přetáhněte manžetu rukavice přes manžetu pláště, abyste zcela zakryli zápěstí a omezili expozici.
- Pokud nemáte k dispozici respirátor, použijte kombinaci chirurgické masky a celoobličejového štítu.
- Pro kontrolu infekce se doporučuje použití pokrývky vlasů nebo návleků na obuv vždy, jsou-li k dispozici.
- OOP by neměly být upravovány (pláště, masky atd.) v průběhu péče o pacienta.
- Odstraňte a zlikvidujte všechny jednorázové OOP do uzavřené odpadní nádoby. (Jednorázové respirátory/masky, ochrana očí, pláště, rukavice atd.).
- Opakovaně použitelné ochranné brýle před dalším použitím očistěte a vydezinfikujte podle pokynů výrobce.
- Opakovaně použitelné pláště je nutné vyprat po každém použití.



ZDRAVOTNICKÉ RUKAVICE MUSÍ SPLŇOVAT:

- **AQL 1,5 nebo nižší** (nižší AQL minimalizuje potenciální riziko kontaminace způsobené kazy – dírkami)
- **ASTM F1671 a EN ISO 374-5 / VIRUS** (bariéra proti průniku viru)
- **EN 455** (norma pro zdravotnické vyšetřovací rukavice)

Pro více informací o prevenci a kontrole onemocnění COVID-19 navštivte: www.ansell.com/us/en/the-new-coronavirus

Poznámka: Vzhledem k novosti tohoto koronaviru jsou doporučení ze zdrojových odkazů ve své podstatě prozatímní, slouží pouze jako rady a jsou založena na současných znalostech situace. Pro prevenci šíření pandemie COVID-19 vždy zajistěte dodržování předpisů místních úřadů veřejného zdraví týkajících se uchovávání, používání a výběru osobních ochranných prostředků (OOP).

Ansell, ® a ™ jsou obchodní známky společnosti Ansell Limited nebo jejich přidružených společností. © 2020 Všechna práva vyhrazena.