
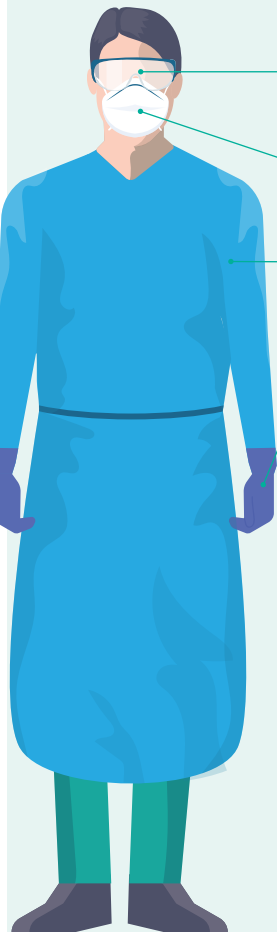


GUÍA VISUAL PARA EL USO SEGURO DE EPI POR PROFESIONALES DENTALES

Según el CDC, los trabajos de alto riesgo son aquellos con potencial de exposición a fuentes conocidas o sospechadas de COVID-19. Los trabajadores en esta categoría incluyen a profesionales dentales que realicen procedimientos que generen aerosoles (por ej. Procedimientos que induzcan la tos, algunos procedimientos dentales, exámenes o recogida invasiva de muestras). Es importante llevar EPI para protegerse usted y a otros de la COVID-19.

Encontrará información adicional sobre el uso de EPI durante la atención clínica en <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/dental-settings.html>.

CONTACTO GENERAL CON PACIENTES	PROCEDIMIENTOS QUE GENEREN AEROSOLIOS O ÁREAS DE ALTO RIESGO
 <ul style="list-style-type: none"> Protección ocular, gafas de seguridad según evaluación de riesgos Respirador N95, FFP2 o nivel superior Batas de tela desechables/reutilizables Guantes desechables 	 <ul style="list-style-type: none"> Protección ocular, protector ocular, gafas de seguridad o visor Respirador N95, FFP2 o nivel superior Batas de tela desechables/reutilizables de manga larga resistentes a fluidos Guantes desechables
<p>CONSEJOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:</p> <ul style="list-style-type: none"> El EPI debe llevarse correctamente puesto antes de entrar en el área del paciente y permanecer puesto durante todo el proceso. Estire siempre el puño del guante por encima del puño de la bata para cubrir la muñeca totalmente y limitar la exposición. Si no hay un respirador disponible, use una combinación de mascarilla quirúrgica y protector facial completo. Entre las recomendaciones para el control de la infección se incluye el uso de cubiertas para el pelo o los zapatos cuando estén disponibles. No debe ajustarse el EPI (por ej. volver a atarse la bata, ajustarse la mascarilla, etc.) durante el cuidado del paciente. Quítese todo el EPI y elimínelo en un cubo de basura estanco. (Respiradores/mascarillas desechables, protección ocular, bata, guantes, etc.). Limpie y desinfecte la protección ocular según las instrucciones del fabricante antes de volver a utilizarla. Las batas de tela reutilizables deben lavarse después de cada uso. 	

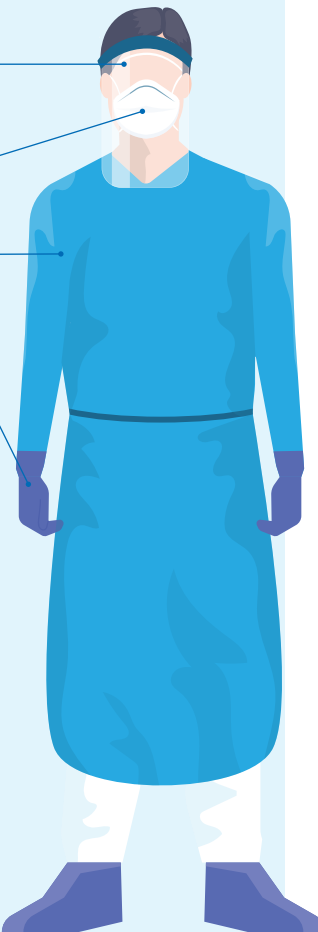

LOS GUANTES MÉDICOS DEBEN TENER

- Estándar AQL 1,5 o inferior (Un AQL inferior minimiza el riesgo potencial de contaminación por defectos de perforaciones)
- Conformidad con las normas ASTM F1671 y EN ISO 374-5 VIRUS (Barrera contra penetración viral)
- Conformidad con la norma EN 455 (Norma para guantes de examen médico)

➔ Para más información sobre la prevención de infecciones y el control de la COVID-19, visite: www.ansell.com/us/en/the-new-coronavirus

Advertencia: Dada la novedad de este coronavirus, las recomendaciones de las referencias de origen son provisionales y de carácter consultivo, y se basan en el conocimiento actual de la situación. Asegure siempre la conformidad con la normativa de las autoridades públicas sanitarias sobre orientación para el uso y selección de equipo de protección individual (EPI) para combatir la pandemia de COVID-19.

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. © 2020 Reservados todos los derechos.