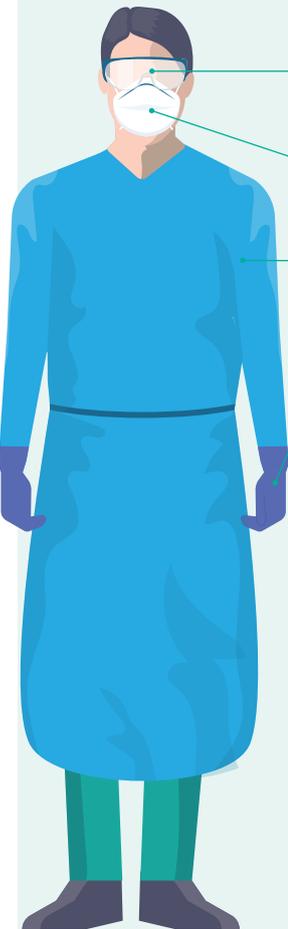
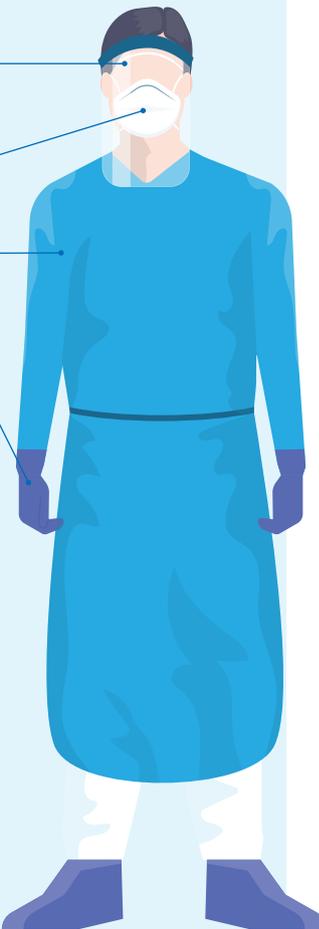


GUIDA VISIVA ALL'USO SICURO DEI DPI PER PROFESSIONISTI DENTALI

Secondo i CDC, le professioni ad alto rischio sono quelle con potenziali esposizioni a fonti note o sospette di COVID-19.

Questa categoria comprende i professionisti dentali che eseguono procedure che generano aerosol (per es. procedure di induzione della tosse, alcune procedure dentali, esami o raccolta invasiva di campioni). È importante indossare DPI per proteggere se stessi e gli altri dal COVID-19.

Maggiori informazioni sull'uso dei DPI durante le cure cliniche sono disponibili all'indirizzo <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/dental-settings.html>.

CONTATTO GENERALE CON I PAZIENTI	PROCEDURE CHE GENERANO AEROSOL O AREE AD ALTO RISCHIO
 <ul style="list-style-type: none"> Protezione degli occhi, occhiali basati sulla valutazione del rischio Respiratore N95, FFP2 o di livello superiore Camici di stoffa monouso/riutilizzabili Guanti monouso 	 <ul style="list-style-type: none"> Protezione degli occhi, schermo facciale, occhiali o visiera Respiratore N95, FFP2 o di livello superiore Camici di stoffa monouso/riutilizzabili, resistenti ai fluidi, a maniche lunghe Guanti monouso
<p>CONSIGLI IMPORTANTI DA RICORDARE:</p> <ul style="list-style-type: none"> I DPI devono essere indossati correttamente prima di entrare nell'area del paziente e rimanere indossati per tutta la durata delle cure. Allungare sempre il polsino del guanto sopra il polsino del camice, per coprire interamente il polso della mano e limitare l'esposizione. Se un respiratore non è disponibile, utilizzare una combinazione di mascherina chirurgica e schermo facciale intero. Le raccomandazioni per il controllo delle infezioni includono, se disponibili, l'uso di copricapo o copriscarpe. I DPI non devono essere regolati (per es. rimettersi il camice, aggiustare la mascherina, ecc.) mentre si assiste il paziente. Togliere e smaltire tutti i DPI monouso in apposito contenitore sigillato per rifiuti. (Mascherine/respiratori monouso, protezioni per gli occhi, camice, guanti, ecc.). Pulire e disinfettare le protezioni riutilizzabili per gli occhi secondo le istruzioni del fabbricante prima del riutilizzo. I camici in stoffa riutilizzabili devono essere lavati industrialmente dopo ogni utilizzo. 	



I GUANTI MEDICALI DEVONO AVERE:

- **AQL standard pari a 1,5 o inferiore** (a un AQL più basso corrisponde un rischio potenziale ridotto al minimo di contaminazione da microforature)
- **Conforme alle norme ASTM F1671 e EN ISO 374-5 VIRUS** (Barriera contro la penetrazione virale)
- **Conforme alla norma EN 455** (norma per i guanti da esplorazione medica)

➔ Per maggiori informazioni su controllo e prevenzione dell'infezione da COVID-19: www.ansell.com/us/en/the-new-coronavirus

Esclusione della responsabilità: data la novità di questo coronavirus, le raccomandazioni delle fonti di riferimento sono, necessariamente, provvisorie e consultive, basandosi sulle attuali conoscenze della situazione. Verificare sempre la conformità alle normative delle autorità pubbliche locali riguardo a selezione, conservazione e utilizzo dei DPI per combattere la pandemia COVID-19.

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. © 2020 Tutti i diritti riservati.