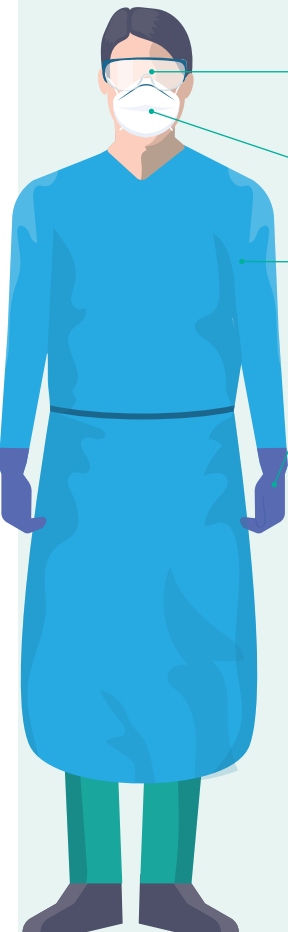
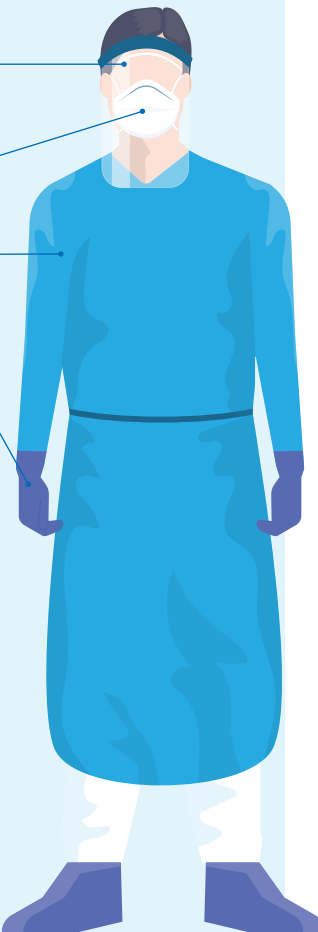


EEN VISUELE GIDS VOOR TANDARTSEN OVER HET VEILIGE GEBRUIK VAN PBM

Volgens de CDC zijn risicovolle beroepen de beroepen waar mensen mogelijk worden blootgesteld aan bekende of vermoedelijke bronnen van COVID-19. Werknemers die in deze categorie vallen, omvatten tandheelkundigen die procedures uitvoeren waarbij aerosols ontstaan (bijvoorbeeld hoestopwekkende procedures, sommige tandheelkundige procedures, onderzoeken of invasieve staalname). Het is belangrijk om PBM te dragen om uzelf en anderen tegen COVID-19 te beschermen.

Aanvullende informatie over PBM voor gebruik tijdens het verlenen van klinische zorg vindt u op <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/dental-settings.html>.

ALGEMEEN CONTACT MET PATIËNTEN	PROCEDURES WAARBIJ AEROSOLS ONTSTAAN OF GEBIEDEN MET EEN HOOG RISICO
 - Oogbescherming, veiligheidsbril op basis van een risicobeoordeling - Ademhalingsmasker van niveau N95, FFP2 of hoger - Wegwerpbaar/ herbruikbaar stofjassen - Handschoenen voor eenmalig gebruik	 - Oogbescherming, oogscherm, veiligheidsbril of vizier - Ademhalingsmasker van niveau N95, FFP2 of hoger - Wegwerpbaar/ herbruikbaar stofjassen met lange mouwen en vloeistofweerstand - Handschoenen voor eenmalig gebruik

Belangrijke tips:

- PBM moeten op de juiste manier worden aangetrokken vóór het betreden van het patiëntgebied en moeten op hun plaats blijven zitten gedurende de zorg.
- Trek de manchet van de handschoenen altijd over de manchet van de jas om de pols volledig te bedekken en blootstelling te beperken.
- Als er geen ademhalingsmasker beschikbaar is, dient u een chirurgisch masker en een volledig gezichtsscherm te gebruiken.
- Aanbevelingen voor infectiebeheersing omvatten het gebruik van haar- of schoenbedekking wanneer deze beschikbaar zijn.
- PBM mogen niet worden aangepast (bijvoorbeeld jas opnieuw dichtknopen, ademhalingsmasker verplaatsen) tijdens de zorg voor de patiënt.
- Gooi alle PBM voor eenmalig gebruik weg in een afgesloten afvalbak (ademhalingsmaskers, gezichtsmaskers, oogbescherming, jassen en handschoenen voor eenmalig gebruik).
- Reinig en desinfecteer herbruikbaar oogbescherming volgens de instructies van de fabrikant voordat deze wordt hergebruikt.
- Herbruikbaar stofjassen dienen na elk gebruik te worden gewassen.



MEDISCHE HANDSCHOENEN MOETEN

- een AQL van 1,5 of lager hebben (een lagere AQL verkleint het mogelijke risico op besmetting vanwege gaatjes)
- voldoen aan ASTM F1671 en EN ISO 374-5 VIRUS (barrière tegen virussen)
- voldoen aan EN 455 (norm voor medische onderzoekshandschoenen)

➔ Ga voor meer informatie over infectiepreventie en -beheersing in verband met COVID-19 naar www.Ansell.com/us/en/the-new-coronavirus

Let op: omdat het coronavirus een nieuw virus is, zijn de aanbevelingen van de geraadpleegde bronnen tijdelijk en bedoeld als advies en gebaseerd op de huidige kennis van de situatie. Zorg er altijd voor dat u de voorschriften van lokale volksgezondheidsinstanties opvolgt voor het zuinig omspringen met, het gebruiken en het kiezen van PBM tegen het coronavirus.

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. © 2020 Alle rechten voorbehouden.