
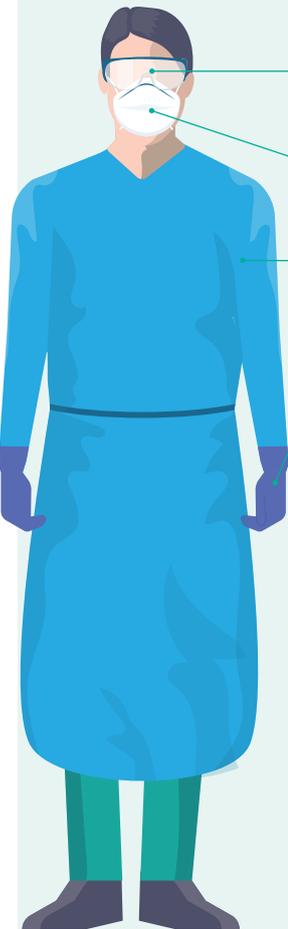


UM GUIA VISUAL PARA A UTILIZAÇÃO SEGURA DE EPI PARA MÉDICOS DENTISTAS

Segundo os centros norte-americanos de controlo e prevenção de doenças (CDC), as profissões de alto risco são aquelas com potencial para exposição a fontes conhecidas ou suspeitas de COVID-19. Os trabalhadores desta categoria incluem profissionais de saúde oral que realizam procedimentos geradores de aerossóis (por exemplo, procedimentos de indução da tosse, alguns procedimentos dentários, exames ou colheita invasiva de amostras). É importante usar equipamentos de proteção individual (EPI) para se proteger a si próprio(a) e outras pessoas da COVID-19.

É possível encontrar mais informações sobre a utilização de EPI durante a prestação de cuidados clínicos em <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/dental-settings.html>.

CONTACTO GERAL COM DOENTES	PROCEDIMENTOS GERADORES DE AEROSSÓIS OU ÁREAS DE ALTO RISCO
	
<ul style="list-style-type: none">Proteção ocular, óculos com base na avaliação de riscoMáscara respiratória de tipo N95, FFP2 ou de nível superiorBatas descartáveis/reutilizáveis em tecidoLuvas descartáveis	<ul style="list-style-type: none">Proteção ocular, viseira, óculos de proteção ou de segurançaMáscara respiratória de tipo N95, FFP2 ou de nível superiorBatas descartáveis/reutilizáveis em tecido com manga comprida e resistentes a fluidosLuvas descartáveis
<p>CONSELHOS IMPORTANTES A NÃO ESQUECER:</p> <ul style="list-style-type: none">Os EPI têm de ser usados corretamente antes de entrar na área do doente e permanecer no devido lugar durante o período de tratamento.Estique sempre o punho da luva sobre o punho da bata para cobrir totalmente o pulso e limitar a exposição.Se uma máscara respiratória não estiver disponível, utilize uma máscara cirúrgica e uma viseira integral.As recomendações de controlo de infeções incluem o uso de toucas para o cabelo ou proteções de calçado sempre que disponíveis.Os EPI não devem ser ajustados (por exemplo, reaperto de batas, ajuste da máscara, etc.) durante o tratamento de doentes.Retire e elimine todos os EPI descartáveis num recipiente de lixo selado. (Máscaras respiratórias descartáveis, proteção ocular, bata, luvas, etc.)Limpe e desinfete as proteções oculares reutilizáveis de acordo com as instruções do fabricante antes de as reutilizar.As batas reutilizáveis em tecido devem ser lavadas após cada utilização.	

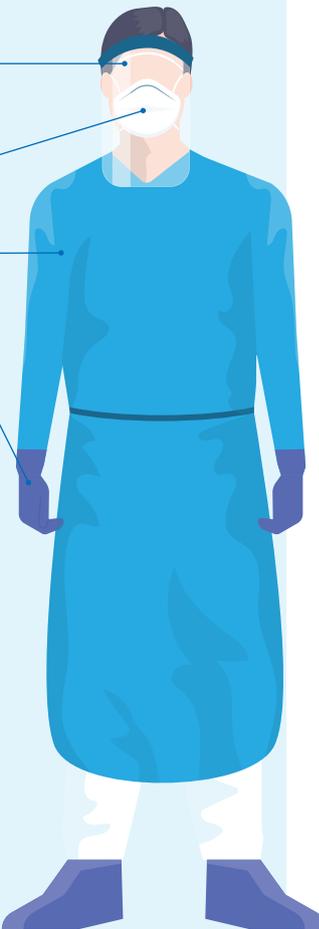

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS PARA LUVAS MÉDICAS:

- **AQL típico de 1,5 ou inferior** (um AQL mais baixo minimiza o risco potencial de contaminação devido a defeitos caracterizados por furos)
- **Conformidade com as normas ASTM F 1671 e EN ISO 374-5 relativa a vírus ("VIRUS")** (barreira contra penetração viral)
- **Conformidade com a norma EN 455** (norma relativa a luvas de exame médico)

➔ Para obter mais informações sobre a prevenção e o controlo de infeções causadas pela COVID-19, visite: www.ansell.com/us/en/the-new-coronavirus

Nota: devido ao facto de este coronavírus ser novo, as recomendações das fontes de referência são provisórias, servem apenas como orientação e baseiam-se nos conhecimentos à data da situação. Certifique-se sempre de que cumpre os regulamentos das autoridades locais de saúde pública relativos a orientações de conservação, utilização e seleção de EPI para combater a pandemia de COVID-19.

Ansell, ® e ™ são marcas comerciais da Ansell Limited ou de uma das suas empresas associadas. © 2020 Todos os direitos reservados.