
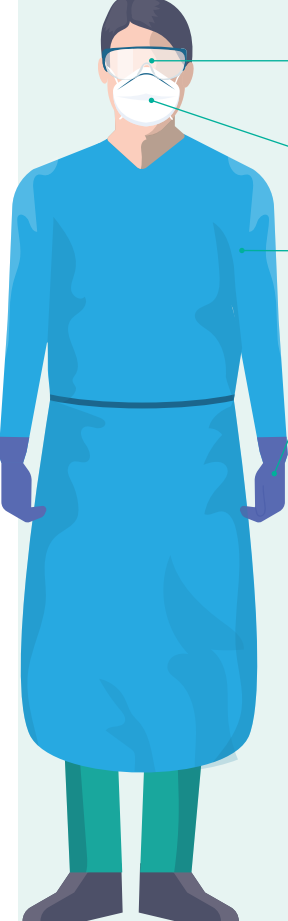


DIŞ HEKİMLERİ İÇİN GÜVENLİ KKD KULLANIMINA DAİR GÖRSEL BİR KILAVUZ

CDC'ye göre, bilinen veya şüphelenilen COVID-19 kaynaklarına maruz kalma potansiyeli olan işler, yüksek riskli işlerdir. Bu kategorideki çalışanlar arasında aerosol üretilen prosedürler (ör. öksürük indüksiyonu prosedürleri, bazı diş prosedürleri, muayeneler veya invazif örnek alma) gerçekleştiren diş hekimleri yer almaktadır. Kendinizi ve başkalarını COVID-19'dan korumak için KKD kullanmanız önemlidir.

Klinik bakım sırasında KKD kullanımı hakkında ek bilgiler şu adreste bulunabilir: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/dental-settings.html>.

HASTALARLA GENEL TEMAS	AEROSOL ÜRETİLEN PROSEDÜRLER VEYA YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR
	
- Risk değerlendirmesine bağlı olarak göz koruması, gözlük - N95, FFP2 veya daha üst seviye solunum maskesi - Tek kullanımlık/yeniden kullanılabilir kumaş önlükler - Tek kullanımlık eldivenler	- Göz koruması, göz siperliği, gözlük veya vizör - N95, FFP2 veya daha üst seviye solunum maskesi - Uzun kollu, sıvıya dayanıklı tek kullanımlık/tekrar kullanılabilir kumaş önlükler - Tek kullanımlık eldivenler
UNUTULMAMASI GEREKEN ÖNEMLİ İPUÇLARI: - KKD hasta alanına girmeden önce doğru şekilde giyilmeli ve bakım süresince yerinde kalmalıdır. - Bileği tam olarak kapatmak ve maruziyeti sınırlandırmak için eldiven manşetini daima giysi manşetinin üzerine çekin. - Bir solunum maskesi yoksa, cerrahi maske ve tam yüz siperliği kombinasyonu kullanın. - Enfeksiyon kontrol önerileri arasında mümkün olduğunda saç bonelerinin veya ayakkabı galoşlarının kullanımı da bulunmaktadır. - KKD hasta bakımı sırasında ayarlanmamalıdır (ör. önlüğün tekrar sıkıştırılması, maskenin ayarlanması, vs.). - Tek kullanımlık tüm KKD'leri çıkarın ve sızdırmaz bir çöp kutusuna atın. (Tek kullanımlık solunum maskeleri/maskeler, göz koruması, önlük, eldiven vs.). - Yeniden kullanılabilir göz koruma gereçlerini, yeniden kullanmadan önce üreticinin talimatlarına göre temizleyin ve dezenfekte edin. - Yeniden kullanılabilir kumaş önlükler her kullanımdan sonra yıkanmalıdır.	

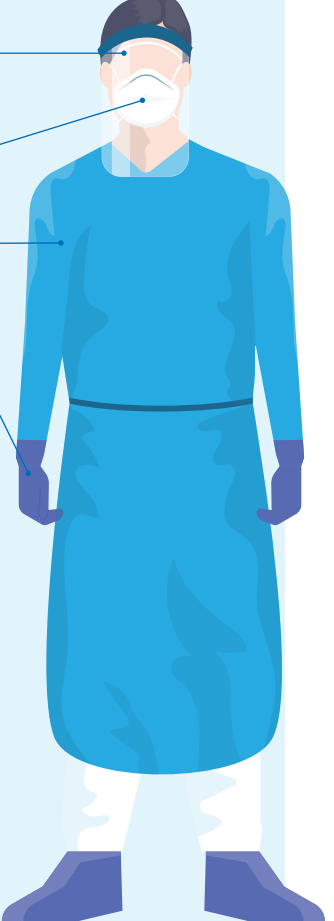

TIBBİ ELDİVENLER AŞAĞIDAKİ NİTELİKLERİ TAŞIMALIDIR

- Standart AQL değeri 1,5 veya daha az olmalıdır (Düşük AQL iğne deliği kusurlarına bağlı potansiyel kontaminasyon riskini en aza indirir)
- ASTM F1671 ve EN ISO 374-5 VIRUS standartlarına uygun olmalıdır (Viral penetrasyona karşı bariyer)
- EN 455'e uygun olmalıdır (Tıbbi muayene eldivenleriyle ilgili standart)

COVID-19'un enfeksiyonunun önlenmesi ve kontrolü hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret ediniz: www.ansell.com/us/en/the-new-coronavirus

Lütfen Dikkat Ediniz: Bu koronavirüs çok yeni olduğundan, kaynak referanslardan gelen öneriler geçici ve tavsiye niteliğindedir ve durum hakkındaki mevcut bilgilere dayanmaktadır. COVID-19 pandemisiyle mücadelede KKD kullanımı ve seçilmesine yönelik rehberlik ile ilgili olarak yerel halk sağlığı makamlarının düzenlemelerine daima uyunuz.

Ansell, ® ve ™ Ansell Limited veya bağlı ortaklıklarından birine ait ticari markalardır. © 2020 Tüm Hakları Saklıdır.