

COVID-19 E UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha pubblicato delle [linee guida](#) per l'uso razionale dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per contrastare il COVID-19 in ambito sanitario e all'interno delle comunità. Le pratiche di prevenzione e attenuazione sono fondamentali per combattere la trasmissione, grazie a selezione, utilizzo, rimozione e smaltimento in modo corretto dei DPI, oltre a ulteriori misure precauzionali.

Rischio di trasmissione



Sulla base delle prove disponibili, il COVID-19 si trasmette tramite contatti ravvicinati e goccioline da persone infette, oppure toccando una superficie contaminata.



Le persone più a rischio sono quelle a stretto contatto o che si prendono cura di soggetti affetti da COVID-19.



Le misure di prevenzione e attenuazione sono fondamentali per combattere la trasmissione.

Misure preventive in comunità



Eseguire spesso l'igiene della mano usando acqua e sapone o un lavaggio a base di alcol.



Evitare di toccare potenziali punti di ingresso dell'infezione, come occhi, naso e bocca.



Rispettare l'igiene respiratoria tossendo o starnutendo all'interno del gomito piegato o in un fazzoletto, smaltendo subito quest'ultimo.



Indossare una mascherina medica in caso di sintomi respiratori, quindi eseguire l'igiene delle mani dopo averla tolta.



Mantenere un distanziamento sociale di almeno 1 metro dalle persone con sintomi respiratori.

L'OMS mette in guardia contro l'abuso di DPI, che potrebbe incidere negativamente sulle forniture future. Il rispetto di queste linee guida punta a garantire un uso razionalizzato dei DPI, salvaguardando la continuità delle forniture in questa emergenza sanitaria pubblica internazionale in continua evoluzione.

Dispositivi rotti o danneggiati

Se il DPI è rotto o danneggiato, l'operatore deve provvedere all'igiene delle mani, togliere il DPI danneggiato, eseguire nuovamente l'igiene delle mani e sostituirlo con un nuovo DPI. In caso di contatto con fluidi corporei, come l'esposizione di occhi e bocca a goccioline, è necessario rispettare i seguenti protocolli di sicurezza.

- 1 Interrompere immediatamente ciò che si sta facendo.
- 2 Eseguire l'igiene delle mani.
- 3 Sciacquare abbondantemente la zona interessata con acqua.
- 4 Rispettare pratiche e procedure di comunicazione stabilite dal posto di lavoro o istituto sanitario.

COVID-19 E UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Quando e come utilizzare i DPI

La selezione del giusto DPI da utilizzare varia in base al rischio di esposizione, all'ambiente, al tipo di personale e all'attività svolta. Quella che segue è una tabella basata sulle linee guida OMS. Mostra i giusti DPI da utilizzare in varie applicazioni. Per ulteriori dettagli o istruzioni a livello locale, consultare l'intero documento.

Utilizzatore	Applicazione	DPI corretto da utilizzare
Operatori sanitari	Controllo preliminare senza contatto diretto	Nessun DPI necessario. Distanza minima di almeno 1 metro
	Esame fisico di un paziente con sintomi respiratori	Mascherina medica, camice, guanti, protezione per gli occhi*
	Assistenza diretta a pazienti COVID-19	Mascherina medica, camice, guanti, protezione per gli occhi*
	Procedure che generano aerosol eseguite su pazienti COVID-19	Grembiule, protezione degli occhi, guanti, camice, respiratori N95 o FFP2 standard o equivalenti
	Assistenza diretta a pazienti COVID-19 a domicilio	Mascherina medica, camice, guanti, protezione per gli occhi
	Trasporto di pazienti sospetti COVID-19 alla struttura sanitaria di riferimento	Mascherina medica, camice, guanti, protezione per gli occhi
Pazienti con sintomi respiratori	Qualsiasi area di una struttura ospedaliera	Distanza minima di almeno 1 metro. Mascherina medica (se tollerata)
	Stanze di consultazione ambulatoriale	Mascherina medica (se tollerata)
	Sale di attesa	Mascherina medica (se tollerata). Spostare immediatamente il paziente in isolamento o in area separata, lontano dagli altri. Se ciò non è possibile, rispettare una distanza di almeno 1 metro dagli altri pazienti
	A domicilio	Distanza fisica di almeno 1 metro Mascherina medica (se tollerata) tranne durante il sonno
Operatori a domicilio	Entrata nella stanza del paziente, ma senza fornirgli cure o assistenza diretta	Mascherina medica†
	Assistenza diretta o manipolazione di feci, urina o rifiuti di un paziente COVID-19	Guanti, mascherina medica, grembiule (se rischio di spruzzi)
Addetti alle pulizie	Entrata nelle stanze dei pazienti COVID-19	Mascherina medica, camice, guanti per mansioni gravose, protezione per occhi (se presente il rischio di spruzzi di materiali organici o sostanze chimiche), stivali o scarpe chiuse da lavoro
	Entrata, dopo e tra una consultazione e l'altra, in una stanza con pazienti affetti da sintomi respiratori	Mascherina medica, camice, guanti per mansioni gravose, protezione per occhi (se presente il rischio di spruzzi di materiali organici o sostanze chimiche), stivali o scarpe chiuse da lavoro
	Pulizia delle aree in cui persone con febbre sono tenute sotto controllo o in isolamento	Mascherina medica, camice, guanti per mansioni gravose, protezione per occhi (se presente il rischio di spruzzi di materiali organici o sostanze chimiche), stivali o scarpe chiuse da lavoro

*Per gli occhi sono consigliate protezioni come occhiali o schermi facciali.

† A causa della carenza internazionale di mascherine, le raccomandazioni variano. Il lettore deve controllare le ultime raccomandazioni del proprio paese.

Ansell Healthcare Products LLC

111 Wood Avenue, Suite 210
Iselin, NJ 08830 USA

Ansell Healthcare Europe NV

Riverside Business Park
Blvd International, 55,
1070 Brussels, Belgium

Ansell Limited

Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia

Ansell Services (Asia) Sdn. Bhd.

Prima 6, Prima Avenue,
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
63000 Cyberjaya, Malaysia

 www.ansell.com

Sulla base delle istruzioni OMS pubblicate il 27 febbraio 2020 e disponibili all'indirizzo https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215/WHO-2019-nCov-IPCPE_use-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited, o di una delle società affiliate. ©2020 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.