

ERKLÄRUNG DER AN- UND AUSZIEHTECHNIK EINMALHANDSCHUHE

Arbeiter in viele Berufsbereichen tragen aktuell Einmalhandschuhe oder medizinische Untersuchungshandschuhe zum Schutz vor einer Ansteckung mit COVID-19. Für die Reduzierung einer Ansteckungsgefahr mit dem neuartigen Coronavirus ist es wichtig, dass der Handschuhträger **vor** und **nach** dem Tragen des Handschuhs für 20 Sekunden die Hände mit Wasser und Seife wäscht oder mit einem Desinfektionsmittel desinfiziert. Darüber hinaus muss er die Handschuhe mit der richtigen Technik an- und ausziehen.

Befolgen Sie als beste Praxis unsere nachstehenden Tipps für das An- und Ausziehen von Handschuhen.

ANZIEHANLEITUNG

AUSZIEHANLEITUNG

Waschen oder desinfizieren Sie die Hände. Nehmen Sie einen Handschuh aus dem Spender. Vermeiden Sie eine Verunreinigung durch ein Berühren der Finger. Prüfen Sie den Handschuh auf Löcher oder Risse.

Die meisten Einmalhandschuhe und medizinischen

Untersuchungshandschuhe können sowohl an der linken als auch an der rechten Hand getragen werden. Wenn Sie spezifische Handschuhe verwenden, richten Sie deren Finger und Daumen an Ihrer Hand aus, damit Sie sicher sind, dass Sie an jeder Hand den richtigen Handschuh tragen.




Greifen Sie die Außenkante des Handschuhs nahe der Innenhandfläche.



Ziehen Sie den Handschuh von der Hand ab, indem Sie die Innenseite nach außen stülpen. Halten Sie ihn mit der anderen behandschuhten Hand.



Führen Sie die fünf Finger in die Stulpe ein. Ziehen Sie die Stulpe über das Handgelenk.

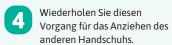



Schieben Sie einen unbehandschuhten Finger unter den Handgelenkbund des verbleibenden Handschuhs. Achten Sie sorgfältig darauf, die Außenseite des Handschuhs dabei nicht zu berühren.



Stülpen Sie den restlichen Handschuh von innen nach außen, so dass ein "Beutel" entsteht, der beide Handschuhe enthält. Entsorgen Sie die Handschuhe ordnungsgemäß. Waschen oder desinfizieren Sie die Hände.

