

適切な手袋着脱方法


使い捨て および単回使用手袋

新型コロナウイルスの感染拡大に対する保護を強化するため、現在様々な業種の作業者が使い捨て手袋または医療用単回使用検査検診用手袋を着用しています。新型コロナといったウイルスへの曝露リスクを軽減するためには、着用前と後に着用者が自身の手を洗うことが重要です。手袋の適切な着脱にも注意が必要です。

当社が推奨する着脱のベストプラクティスをご紹介します。


着用の仕方

1 片方の手袋を箱から取り出します。この時、汚染リスクを軽減するため、手袋の指に触らないようにしてください。穴や裂創がないことを確認してください。

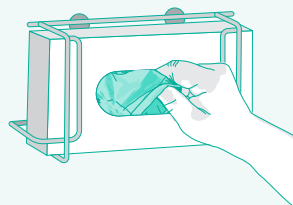


2 使い捨て手袋および医療用単回使用手袋のほとんどは左右兼用です。


左右専用の手袋を使用する場合は、グローブの4本の指と親指を自身の手と同じ向きにし、左右が一致した手袋であることを確認してください。

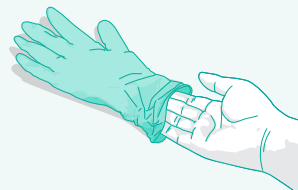

3 5本の指をカフから中に入れてカフを引っ張って手首を覆います。

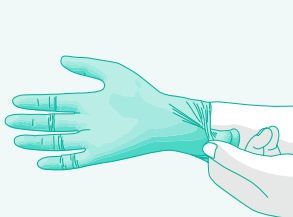


4 同じ手順を繰り返し、もう片方の手袋を着用します。

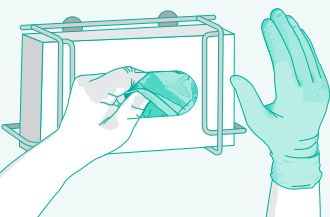


外し方

1 手袋の外側の手首に近い端の部分をつかんでください。

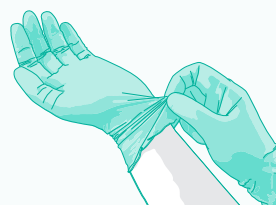


2 手袋を手から剥がすように外し、裏側が外になるように返します。

外したら手袋をはめた反対側の手で持ってください。

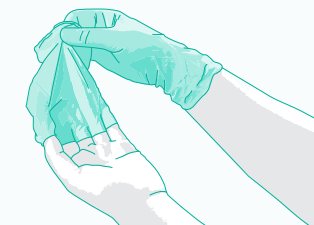

3 手袋を外した方の手の指を手袋をした方の手首の内側に入れ、スライドさせます。このとき、手袋の外側に触れないよう注意してください。

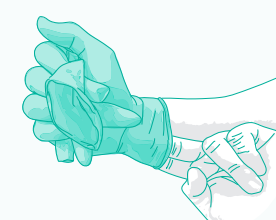

4 残っている手袋の内側から手袋を裏返しながらか外し、2つの手袋を包む袋状になるようにし、適切に手袋を廃棄してください。

