

AAN- EN UITTREKKEN VAN HANDSCHOENEN VOOR EENMALIG GEBRUIK


Veel verschillende werknemers dragen nu handschoenen voor eenmalig gebruik of medische onderzoeks-gloves om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Om blootstelling aan het nieuwe coronavirus te voorkomen, is het belangrijk dat dragers hun handen 20 seconden wassen met water en zeep of een handgel op basis van alcohol gebruiken **vóór** en **na** het dragen van de handschoenen. Ook moeten ze ervoor zorgen dat ze de handschoenen op de juiste manier aan- en uittrekken.

Volg onze tips voor het aan- en uittrekken hieronder.


AANTREKKEN

UITTREKKEN


1 Was uw handen. Neem één handschoen uit de doos en voorkom dat u de vingers aanraakt om het risico op besmetting te verkleinen. Controleer of er geen gaten of scheuren in de handschoen zitten.

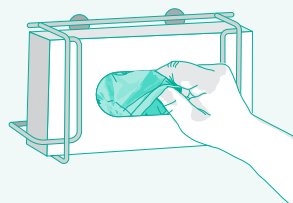


2 De meeste handschoenen voor eenmalig gebruik en medische onderzoeks-gloves zijn geschikt voor beide handen. Als u handspecifieke handschoenen gebruikt, moet u de vingers en duim van de handschoen uitlijnen met uw hand om te controleren of u de juiste handschoen voor de juiste hand gebruikt.

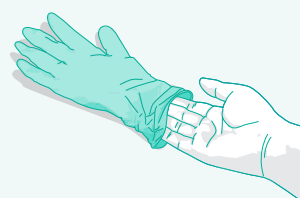

3 Steek alle vijf de vingers in de manchet en trek hem over de pols.

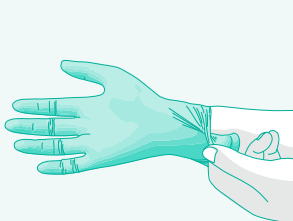

4 Herhaal de procedure om de andere handschoen aan te trekken.

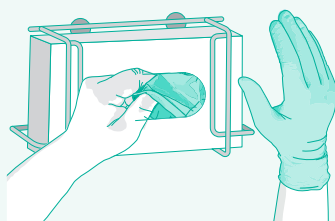


1 Neem de buitenste rand van de handschoen bij de palm vast.



2 Trek de handschoen binnestebuiten van de hand. Houd hem vast in de andere hand met handschoen.



3 Steek een blote vinger onder de manchet van de tweede handschoen zonder de buitenkant van de handschoen aan te raken.

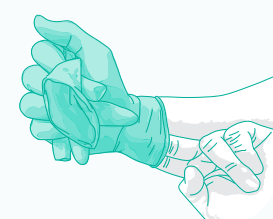

4 Trek de tweede handschoen van binnenuit uit tot een zak waar beide handschoenen in zitten. Gooi de handschoenen op de juiste manier weg. Was uw handen.

