
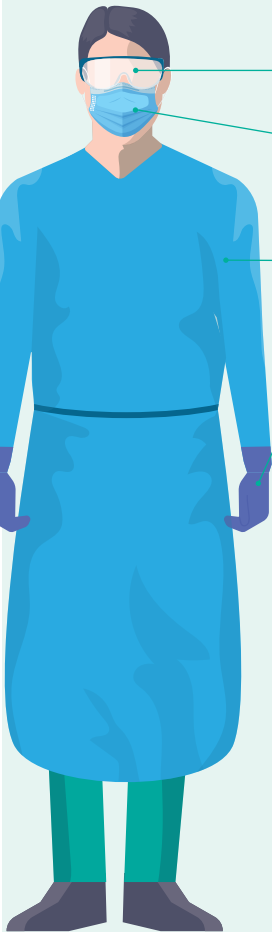


GUÍA VISUAL DEL USO SEGURO DE PPE EN ENTORNOS HOSPITALARIOS PARA EL PERSONAL SANITARIO

De acuerdo con la CDC (Centro para el Control de Enfermedades, por sus siglas en inglés), los trabajos de alto riesgo son aquellos con exposición potencial a fuentes conocidas o sospechosas de COVID-19.¹ Los trabajadores de esta categoría incluyen a enfermeras, auxiliares de enfermería, médicos, técnicos, terapeutas, farmacéuticos, estudiantes y pasantes. La CDC recomienda el uso de una combinación de precauciones estándar, de contacto y contagio aéreo para proteger al personal sanitario hospitalario de la exposición al COVID-19. Se deben usar respiradores N95 o respiradores que ofrezcan un nivel de protección más alto, al participar o realizar procedimientos que generen partículas aerosoles. Puede encontrar información adicional sobre el uso del PPE durante el cuidado clínico en <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ushealthcarefacilities.html>

| ESTÁNDARES Y PRECAUCIONES DE CONTACTO ^{1,2,3} | PRECAUCIONES DE CONTAGIO AÉREO Y POR MICROGOTAS ^{1,2,3} |
|--|--|
|  <ul style="list-style-type: none"> Protección ocular, gafas Mascarilla resistente a fluidos Batas de tela de manga larga desechables/reutilizables y resistentes a fluidos Guantes desechables |  <ul style="list-style-type: none"> Protección ocular gafas o careta N95 o respirador de alto nivel Batas de tela de manga larga desechables/reutilizables y resistentes a fluidos Guantes desechables |
| <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 10px;"> <p>CONSEJOS IMPORTANTES: ^{1,2,3}</p> <ol style="list-style-type: none"> Seguir las directrices de las instalaciones para las alternativas de PPE o cualquier procedimiento de protección. El tipo de PPE depende de la exposición. Para procedimientos que generan partículas aerosoles se recomienda utilizar un respirador N95. El PPE debe estar colocado correctamente antes de entrar al área de pacientes y permanecer en su lugar durante el tiempo de cuidado y atención. Siempre extienda el puño del guante sobre el puño de la bata para cubrir completamente la muñeca y limitar la exposición. Si no dispone de un respirador, utilice una combinación de una mascarilla quirúrgica y un protector facial completo. El PPE no debe ajustarse durante el cuidado del paciente (ej. atar la bata, ajustar la mascarilla, etc.). Las recomendaciones para el control de infecciones incluyen el uso de protectores para el cabello o los zapatos siempre que estén disponibles. Retire y separe todo el PPE desechable en un contenedor de basura sellado (ej. respiradores/mascarillas desechables, protección ocular, batas, guantes, etc.). Limpiar y desinfectar la protección ocular reutilizable de acuerdo con las normas del fabricante. Las batas de tela reutilizables deben lavarse después de cada uso. </div> | |

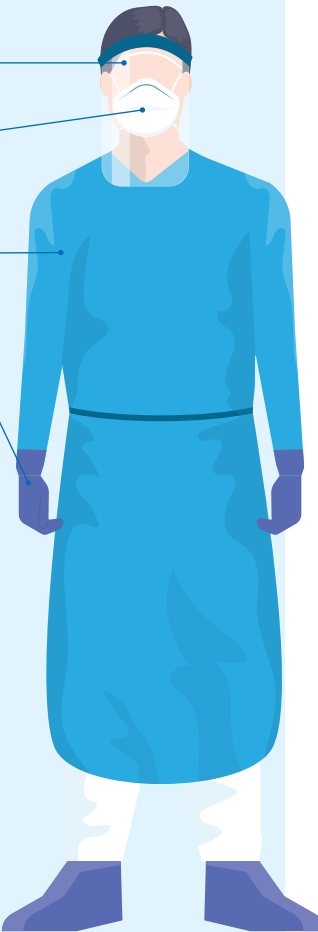

LOS GUANTES MÉDICOS DEBEN:

- Cumplir con el estándar AQL 2.5 o menor (minimizar los riesgos potenciales de contaminación ocasionados por defectos, como posibles agujeros).
- Cumplir con las normas F1671 de la ASTM y EN ISO 374-5 VIRUS (barrera contra la penetración viral).
- Cumplir con la norma EN 455 (norma para guantes de examinación médica).

Referencias:

1. CDC Infection Control Guidance for Healthcare Professionals About COVID-19. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control.html>. Consultado el 4 de agosto de 2020.
2. Interim Infection Prevention and Control Recommendations for Patients with Suspected or Confirmed Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Healthcare Settings. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-recommendations.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Finfectioncontrol%2Fcontrol-recommendations.html. Consultado el 4 de agosto de 2020.
3. The Joint Commission, Personal Protective Equipment (PPE). <https://www.jointcommission.org/en/covid-19/>. Consultado el 4 de agosto de 2020.

➔ Para más información sobre la prevención y control de la infección de COVID-19, por favor visite: www.ansell.com/us/en/the-new-coronavirus

Nota: Debido a la novedad de este coronavirus, las recomendaciones de las fuentes de referencia son de tipo provisional y se basan en el conocimiento actual de la situación. Asegúrese de cumplir las regulaciones de sus autoridades locales de salud pública en cuanto a la guía de protección, uso y selección de PPE para combatir la pandemia de COVID-19.