
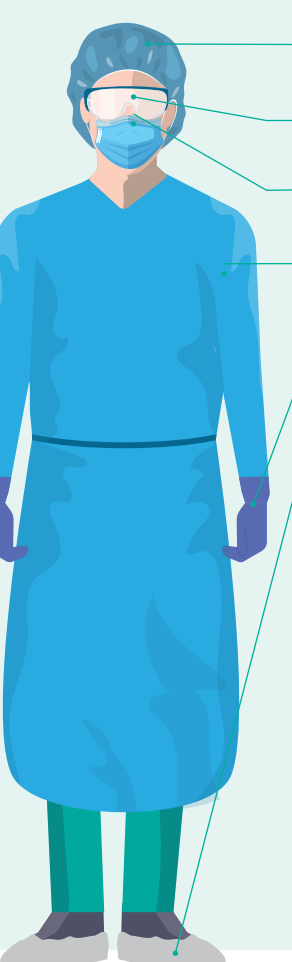


GUÍA VISUAL DEL USO SEGURO DE PPE EN EL MANEJO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS QUIRÚRGICOS

De acuerdo con la CDC (Centro para el Control de Enfermedades, por sus siglas en inglés), los trabajos de alto riesgo son aquellos con exposición potencial a fuentes conocidas o sospechosas de COVID-19.¹ La CDC recomienda utilizar una combinación de precauciones estándares de contacto y contagio aéreo para proteger al personal sanitario de la exposición de COVID-19. Los trabajadores de esta categoría incluyen a todo el personal de servicios quirúrgicos, médicos y personal de asistencia en los entornos de atención quirúrgica. El uso de PPE (Equipo de Protección Personal, por sus siglas en inglés), se basa en el riesgo de exposición. Se deben usar respiradores N95 o respiradores que ofrezcan un alto nivel de protección, al participar en o realizar procedimientos que generen partículas aerosoles. Puede encontrar información adicional sobre el uso del PPE durante el cuidado clínico en www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/infection-control/controlrecommendations.html

ESTÁNDARES Y PRECAUCIONES DE CONTACTO ^{1,2,3}	PRECAUCIONES DE CONTAGIO AÉREO Y POR MICROGOTAS ^{1,2,3}
 <ul style="list-style-type: none"> Cubrecabeza desechable Protección ocular, gafas Mascarilla resistente a los fluidos Batas de tela de manga larga, desechables/reutilizables y resistentes a los fluidos Guantes desechables quirúrgicos o de examen según su función Cubiertas desechables para zapatos 	 <ul style="list-style-type: none"> Cubrecabeza desechable Protección ocular, gafas o careta N95 o respirador de alto nivel Batas de tela de manga larga, desechables/reutilizables y resistentes a los fluidos Guantes desechables quirúrgicos o de examen según su función Cubiertas desechables para zapatos
<p>CONSEJOS IMPORTANTES: ^{1,2,3}</p> <ul style="list-style-type: none"> • Considere la posibilidad de usar solo ropa de quirófano en las instalaciones según la política del hospital. • El PPE debe usarse correctamente antes de entrar al área de pacientes y permanecer en su lugar durante el tratamiento y cuidado. • Siempre extienda el puño del guante sobre el puño de la bata para cubrir completamente la muñeca y limitar la exposición. • Si no dispone de un respirador, utilice una combinación de una mascarilla quirúrgica y un protector facial completo. • El PPE no debe ajustarse durante el cuidado del paciente (ej. volver a atar la bata, ajustar la mascarilla, etc.). • Retire y descarte todo el PPE desechable en un contenedor de basura sellado (ej. respiradores/mascarillas desechables, protección ocular, bata, guantes, etc.). • Limpie y desinfecte la protección ocular reutilizable siguiendo las instrucciones del fabricante antes de volver a utilizarla. • Las batas de tela reutilizables deben lavarse después de cada uso. 	

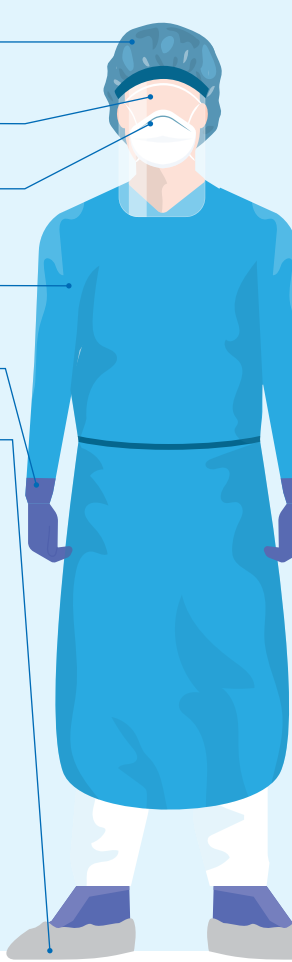

LOS GUANTES MÉDICOS DEBEN:

- Cumplir con el estándar AQL 2.5 o menor y con el estándar AQL 1.5 o menor (minimizar los riesgos potenciales de contaminación ocasionados por defectos como posibles agujeros).
- Cumplir con las normas F1671 de la ASTM y EN ISO 374-5 VIRUS (barrera contra la penetración viral).
- Cumplir con la norma EN 455 (norma para guantes de examen médica).

Referencias:

1. CDC Infection Control Guidance for Healthcare Professionals About COVID-19. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control.html>. Consultado el 27 de julio de 2020.
2. Interim Infection Prevention and Control Recommendations for Patients with Suspected or Confirmed Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Healthcare Settings. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-recommendations.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Finfectioncontrol%2Fcontrol-recommendations.html. Consultado el 27 de julio de 2020.
3. The Joint Commission, Personal Protective Equipment (PPE). <https://www.jointcommission.org/en/covid-19/>. Consultado el 27 de julio de 2020.

➔ Para más información sobre la prevención y control de la infección de COVID-19, por favor visite: www.ansell.com/us/en/the-new-coronavirus

Nota: Debido a la novedad de este coronavirus, las recomendaciones de las fuentes de referencia son de tipo provisional y se basan en el conocimiento actual de la situación. Asegúrese de cumplir las regulaciones de sus autoridades locales de salud pública en cuanto a la guía de protección, uso y selección de PPE para combatir la pandemia de COVID-19.