

PROCÉDURE D'ENFILAGE ET DE RETRAIT

Gants jetables

Une foule de travailleurs doivent maintenant porter des gants jetables ou des gants pour examen médical afin de se protéger contre la propagation de la COVID-19. Pour réduire le risque d'exposition au nouveau coronavirus, il est important que les porteurs se lavent les mains avant et après l'utilisation des gants. Ils doivent également enfiler et retirer leurs gants de façon appropriée.


Suivez nos conseils sur les meilleures pratiques d'enfilage et de retrait ci-dessous.

SUIVEZ LES 5 INDICATIONS DE L'HYGIÈNE DES MAINS AVANT D'ENFILER OU DE RETIRER DES GANTS¹.


ENFILAGE

RETRAIT


1 Retirer un gant de la boîte en évitant de toucher les doigts pour réduire le risque de contamination. S'assurer qu'il n'y a pas de trous ni de déchirures.

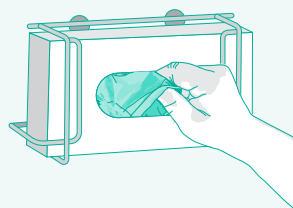


2 La plupart des gants jetables et des gants pour examen médical sont ambidextres. Pour les gants de conception main droite et main gauche, aligner les doigts et le pouce du gant avec votre main pour vous assurer d'utiliser le bon gant.

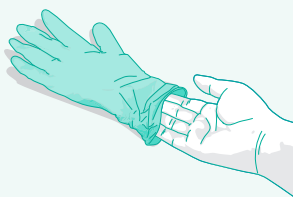

3 Insérer cinq doigts dans le gant et le tirer par-dessus le poignet.

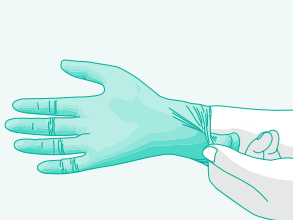

4 Répéter les mêmes étapes pour enfiler l'autre gant.

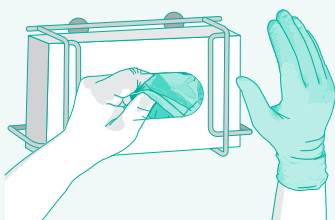


1 Saisir le bord extérieur du gant près du poignet.




2 Retirer le gant en le retournant à l'envers. Tenir le gant avec la main gantée opposée.



3 Glisser un doigt déganté sous le poignet du gant en prenant soin de ne pas toucher l'extérieur du gant.

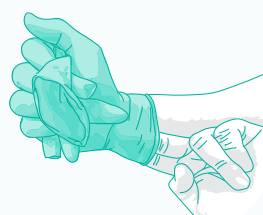

4 Retirer le gant de l'intérieur afin de créer une « pochette » pour les deux gants. Jeter les gants de façon appropriée.

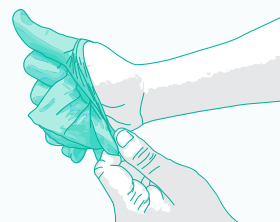

1. Organisation mondiale de la Santé (OMS) : Recommandations de l'OMS pour l'hygiène des mains au cours des soins (2009)