

# TECHNIQUE D'ENFILAGE À MAINS FERMÉES DE GANTS CHIRURGICAUX STÉRILES

## TEL QUE RECOMMANDÉ PAR ACORN<sup>1</sup> :

L'équipe du bloc opératoire doit enfiler les gants chirurgicaux stériles en prenant soin de respecter les règles d'asepsie pour préserver la stérilité du champ.

ACORN ne favorise pas la pratique consistant à retourner les articles sur le champ stérile.

Elle favorise le port de gants non poudrés ou sans latex afin de protéger les travailleurs de la santé et les patients.

## Étapes d'enfilage

**1** En gardant les mains à l'intérieur de la blouse chirurgicale, prendre les gants stériles des mains de l'assistant de salle. Éviter de toucher l'emballage au moment de prendre les gants et garder les mains à l'intérieur de la manchette en tout temps au moment de revêtir la blouse et pendant l'enfilage des gants. Alors que les mains sont recouvertes par les manchettes, placer les gants dans leur emballage en papier sur une surface stérile. Placer l'emballage en papier contenant les gants devant soi comme un livre.



**2** Alors que la blouse couvre toujours les doigts, utiliser la main droite pour retirer le gant gauche. Placer la main gauche, paume vers le haut, les doigts tendus. Déposer le gant sur le poignet gauche et saisir la manchette avec le pouce gauche. Les doigts dans la manchette devraient pointer vers le coude gauche.

**3** Placer le pouce droit à l'intérieur de la partie supérieure de la manchette. Former un poing avec la main droite et étirer le gant sur le bout des doigts de la main gauche.

**4** Alors que les doigts de la main gauche sont tendus, tirer sur la manche et le gant jusqu'à ce que la main remplisse le gant. Maintenant, avec la main droite couverte par la manchette, tirer la manchette du gant gauche par-dessus la manche de la blouse. Il n'est pas nécessaire de compléter cette étape avant d'avoir enfilé le gant droit.



**5** Répéter la procédure ci-dessus pour enfiler l'autre gant. C'est-à-dire, utiliser la main gauche gantée pour placer le gant droit sur votre poignet droit.

**6** Glisser le pouce gauche dans la partie supérieure de la manchette, former un poing et étirer.

**7** Tirer du même coup sur la manche et le gant. Il est nécessaire d'utiliser les quatre doigts pour tirer sur la manchette du gant. Éviter de tirer sur la paume du gant.

**8** Maintenant que les deux mains sont couvertes, compléter l'ajustement plus précis des deux gants sans risque de contamination. Tirer doucement sur les manches des gants pour éliminer les plis de la blouse. Vérifier ce qui suit pour empêcher la séparation entre le gant et la blouse :

- les manches de la blouse sont suffisamment longues pour éviter la restriction des mouvements et former un espace entre la manchette de la blouse et le gant;
- la manchette de la blouse est à la base de la paume permettant ainsi au gant de bien adhérer à la blouse; et
- il n'y a pas de plis dans la manchette du gant à l'extrémité de celui-ci.

**ACORN recommande le double gantage. Une seconde paire de gants est enfilée de la même manière que celle décrite ci-dessus.**

### Référence

1. 2014 – 2015 ACORN Standards for Perioperative Nursing

[www.ansell.com/ansellcares](http://www.ansell.com/ansellcares)

Ansell et les produits suivis des symboles MD et MC sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales.  
© 2015 Ansell Limited. Tous droits réservés.

### Ansell Limited

Level 3, 678 Victoria Street  
Richmond, VIC 3121 Australia  
Telephone | 1800 337 041  
Facsimile | 1800 803 578