



BioClean-C™ de
protection contre les
agents
chimiothérapeutiques
avec manches stérile

Tablier de protection contre les agents chimiothérapeutiques avec manches – stérile

Le tablier BioClean-C de protection contre les agents chimiothérapeutiques avec manches protège contre une gamme de médicaments cytotoxiques. Fabriqué en tissu CleanTough léger et peu pelucheux, le tablier est muni d'une encolure réglable, de bandes d'attaches à l'arrière et de coutures soudées par ultrasons avec ruban protecteur aux manches.

Key Features and Benefits

- Testé conformément à la norme de perméation ASTM F739-12
- Coutures soudées par ultrasons avec ruban protecteur
- Bandes d'attache à l'arrière
- Encolure réglable
- Tissu léger et peu pelucheux
- Tissu CleanTough



Secteurs industriels

- Environnements Contrôlés et Critiques
- Production et Fabrication
- Laboratoire et Recherche





BioClean-C™ de protection contre les agents chimiothérapeutiques avec manches stérile

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Matériau	CleanTough™
Normes de vérification	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
Normes	ASTM F739, CE 0598, EN 1149-5:2008, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN 863, EN 9073-4, EN ISO 13688:2013, EN ISO 14325, ISO 11137-1:2006, Partial Body Protection Only, Catégorie III, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 13034:2005 + A1:2009
Présentation de l'emballage	Une unité par sac intérieur scellé en polyéthylène; un sac intérieur par sac extérieur scellé en polyéthylène; 40 sacs extérieurs par boîte doublée (40 unités)
Pays d'origine	Chine
Méthode de stérilisation	Rayonnement gamma (25 kGy)
Dose minimale de stérilisation	25kGy
Niveau d'assurance de stérilité	10 ⁻⁶
Classe de salle blanche	ISO de classe 4 et grade A compatible avec les BPF UE
Durée de conservation	Three (3) years from date of manufacture.
Construction	Ultrasonically bonded sleeve seams with protective tape & 100% polyester elasticated cuffs.
Caractéristiques	Faible coefficient de perte de particules

PARTICULES AÉROPORTÉES - RÉSULTAT DE TEST

ESSAI	RÉSULTAT
Particules aéroportées (test du tambour de Helmke)	â‰¥ 0.5ÂQm (comptes/min) <1700

MÉTHODE D'ESSAI ASTM F739-12, RÉSULTATS

MÉDICAMENT	Temps de passage moyen (MBT), minutes Breakthrough of the test chemical is deemed to have occurred when the permeation rate has reached 0.1 Qg/cm ² /min
CISPLATINE	>240
CARMUSTINE	> 240
CYCLOPHOSPHAMIDE	>240
DOXORUBICINE HYDROCHLORIDE	>240
5-FLUOROURACILE	>240
MÉTHOTREXATE	>240
ÉTOPOSIDE	<6
PACLITAXEL	>240
THIOTÉPA	55 (46,88,31)

Résultats obtenus dans des conditions de laboratoire contrôlées, par un laboratoire d'essai externe agréé.

TABLEAU DES TAILLES

BCAS-S : Taille : P, Poitrine : 84-92 cm (33-36 po), Hauteur : 164-170 cm (5 pi 4 po-5 pi 6 po)
BCAS-M : Taille : M, Poitrine : 92-100 cm (36-39 po), Hauteur : 170-176 cm (5 pi 6 po-5 pi 9 po)
BCAS-L : Taille : G, Poitrine : 100-108 cm (39-42 po), Hauteur : 176-182 cm (5 pi 9 po-6 pi)
BCAS-XL : Taille : TG, Poitrine : 108-116 cm (42-45 po), Hauteur : 182-188 cm (6 pi-6 pi 2 po)



BioClean-C™ de protection contre les agents chimiothérapeutiques avec manches stérile

RÉSULTATS AUX ESSAIS DE PERFORMANCE DU MATÉRIAU

ESSAI	RÉSULTAT	CLASSE DE PERFORMANCE
Résistance à l'abrasion	10 to 100 cycles	1
Résistance à la perforation	10 N	1
Résistance à la déchirure trapézoïdale (sens travers)	CD 32.3 N	2
Résistance à la déchirure trapézoïdale (sens machine)	MD 50.6 N	3
Résistance à la traction (sens travers)	CD 47 N	1
Résistance à la traction (sens machine)	MD 94 N	2
Déperlanche aux liquides - 30 % H ₂ SO ₄	99.0%	3
Déperlanche aux liquides - 10 % NaOH	98.4%	3
Déperlanche aux liquides - Oxygène	91.4%	1
Déperlanche aux liquides - Butanol	93.9%	3
Pénétration par des liquides - 30 % H ₂ SO ₄	0%	3
Pénétration par des liquides - 10 % NaOH	0%	3
Pénétration par des liquides - Oxygène	0%	3
Pénétration par liquide - Butanol	0%	3
Résistance des coutures ¹	74 N	2

1. Seam not destroyed

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
Télééc. : +32 (0) 2 528 74 01

Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
Tél. : +603 8310 6688
Télééc. : +603 8310 6699

Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
US Tél. : 1 800 800-0444
US Téléc. : 1 800 800-0445
CA Tél. : 1 800 363 8340

Amérique latine et Caraïbes

Ansell Commercial México S.A. de C.V.
Tél. : 52 442 248 1544 / 248 3133

Australie

Ansell Limited
Tél. : +61 1800 337 041
Télééc. : +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
Tél. : +44 1638 663338
Télééc. : +44 1638 668890

Normes de performance et conformité aux règlements



Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux États-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : www.ansell.com/patentmarking (en anglais seulement). © Ansell Limited, 2024. Tous droits réservés.

Ni le présent document ni tout autre énoncé aux présentes fait par Ansell ou au nom de cette dernière ne doit être interprété comme constituant une garantie de valeur marchande ou une garantie que tout produit Ansell convient à un usage particulier. Ansell n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à la convenance ou au caractère adéquat des gants choisis par le porteur pour l'exécution de tâches particulières.

Veuillez consulter la trousse de validation des produits ou communiquer avec le service à la clientèle d'Ansell pour obtenir des données précises quant à l'utilisation des vêtements avec des médicaments cytotoxiques. Les vêtements de protection contre de tels

Ansell

