

Couvertures de manchons non stériles pour salles blanches, pour la protection contre les médicaments de chimiothérapie

- **Protection optimisée** : Les housses de protection contre la chimiothérapie BioClean™ sont spécialement conçues pour protéger contre toute une série de médicaments de chimiothérapie, avec des coutures collées par ultrasons et une bande de protection, pour une sécurité accrue.
- **Propreté garantie** : Ces vêtements de protection contre la chimiothérapie sont fabriqués dans un matériau CleanTough™ qui est à la fois léger et peu pelucheux.
- **Protection assurée de la barrière** : Les housses de protection contre la chimiothérapie BioClean-C™ ont été testées par rapport aux normes de perméation ASTM F739-12.
- **Un maximum de praticité** : Ces gaines stériles à taille unique sont conçues pour être enfilées rapidement et simplement.



Key Features and Benefits

- **Couture collée par ultrasons** : pour les housses de manche qui offrent un ajustement sûr.
- **Tissu CleanTough™ léger et peu pelucheux** : confort et durabilité.
- **Conformité à la norme ASTM F739-12** : protection assurée contre la perméation

Secteurs industriels

- Environnements contrôlés et critiques
- Production et fabrication
- Laboratoire et recherche





BioClean-C™ Sleeve Covers BCSC

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Matériau	CleanTough™
Normes de contrôle	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
Normes	ASTM F739, CE 0598, EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13688:2013, EN 13935-2, EN ISO 14325, Partial Body Protection Only, Catégorie III, EN 14605:2005 + A1:2009
Pays d'origine	Chine
Classe de salle blanche	Classe 4 ISO
Durée limite de stockage	Five (5) years from date of manufacture.
Construction	Ultrasonically bonded seams covered with protective tape
Caractéristiques	Faible teneur en particules

RÉSULTATS DES ESSAIS DE RELARGAGE PARTICULAIRE

TEST	RÉSULTAT
Relargage particulaire (méthode du tambour de Helmke)	$\geq 0,5$ Qm (comptes/min) < 1 700

RÉSULTATS DE LA MÉTHODE D'ESSAI ASTM F739-12

MÉDICAMENT	Temps de passage moyen, en minutes Breakthrough of the test chemical is deemed to have occurred when the permeation rate has reached 0.1 Qg/cm ² /min
CISPLATINE	>240
CARMUSTINE	> 240
CYCLOPHOSHAMIDE	>240
CHLORHYDRATE DE DOXORUBICINE	>240
5-FLUOROURACILE	>240
MÉTHOTREXATE	>240
ÉTOPOSIDE	<6
PACLITAXEL	>240
THIOTÉPA	55 (46,88,31)

Résultats obtenus dans des conditions contrôlées, par des laboratoires de test externes accrédités.

TABLEAU DES TAILLES

BCSC ; Taille : Universelle

RÉSULTATS DES ESSAIS DE PERFORMANCES DES MATÉRIAUX

TEST	RÉSULTAT	CLASSE DE PERFORMANCE
Résistance à l'abrasion	10 to 100 cycles	1
Résistance à la perforation	10 N	1
Résistance à la déchirure trapézoïdale dans le sens travers	CD 32.3 N	2
Résistance à la déchirure trapézoïdale dans le sens machine (MD)	MD 50.6 N	3
Résistance à la traction dans le sens travers (CD)	CD 47 N	1
Résistance à la traction dans le sens machine (MD)	MD 94 N	2
Imperméabilité aux liquides - H ₂ SO ₄ 30 %	99.0%	3
Imperméabilité aux liquides - NaOH 10 %	98.4%	3
Imperméabilité aux liquides - O-xylène	91.4%	1
Imperméabilité aux liquides - Butan-1-ol	93.9%	3
Pénétration des liquides - H ₂ SO ₄ 30 %	0%	3
Pénétration des liquides - NaOH 10 %	0%	3
Pénétration des liquides - Oxylène	0%	3
Pénétration des liquides - Butan-1-ol	0%	3
Résistance des coutures ¹	74 N	2

1. Seam not destroyed

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
T : + 603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
US T : +1 800 800 0444
US F : +1 800 800 0445
CA T : +1 800 363 8340

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Australie

Ansell Limited
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T : +44 1638 663338
F : +44 1638 668890

Normes de performance et conformité réglementaire

CE 0598



TYPE PB [6]



PARTIAL BODY PROTECTION ONLY



TYPE PB4

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

Veillez vous reporter au dossier de validation des produits ou contacter le service clientèle Ansell pour obtenir des données précises concernant l'utilisation des vêtements pour la manipulation de médicaments cytotoxiques. Les vêtements de protection contre ces produits doivent être sélectionnés spécifiquement en fonction du type de substances chimiques utilisées.