



Fartuch BioClean-C™ BCDA

Lekki, niesterylny fartuch ochronny, chroniący przed szeregiem leków stosowanych w chemioterapii

- **Zapewniona ochrona:** Fartuch BioClean-C™ BCDA spełnia normę przenikania ASTM F739-12, co czyni go idealnym fartuchem odpornym na działanie środków chemicznych stosowanych w chemioterapii.
- **Zmniejszona waga i ryzyko zanieczyszczenia:** Ten fartuch roboczy jest wykonany z lekkiego materiału CleanTough™, który ogranicza ryzyko zanieczyszczenia dzięki temu, że nie pozostawia kłacek
- **Ulepszone dopasowanie:** Zaprojektowany z regulowanym zapięciem na szyi i taśmami do wiązania z tyłu, ten fartuch ochronny umożliwia użytkownikom znalezienie wygodnego, spójnego dopasowania i łatwe zakładanie.



Key Features and Benefits

- **Norma przenikania ASTM F739-12:** Ochrona przed lekami stosowanymi w chemioterapii
- **Materiał CleanTough™:** Lekkie, niskostrzępiące się i redukujące zanieczyszczenia
- **Taśmy wiązane i zapięcie na szyi:** lepsze dopasowanie i bezstresowe zakładanie

Branże

- Środowiska kontrolowane/krytyczne
- Produkcja i wytwarzanie
- Laboratoria i działy badawczo-rozwojowe





Fartuch BioClean-C™ BCDA

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Materiał	CleanTough™
Normy audytu	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
Normy	ASTM F739, CE 0598, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN 863, EN 9073-4, EN ISO 14325, Partial Body Protection Only, Kategoria III, EN 14605:2005 + A1:2009, UKCA
Przegląd opakowań	Jedna sztuka na szczelnie zamknięty woreczek; jeden woreczek na szczelnie zamknięty zewnętrzny worek PE; 50 worków zewnętrznych w wyłożonym kartonie (50 sztuk)
Kraj pochodzenia	Chiny
Klasa pomieszczeń czystych	Klasa ISO 4
Okres trwałości	Five (5) years from date of manufacture.
Budowa	Adjustable neck, tie fastening at waist
Charakterystyka	Pozostawiający mało cząstek stałych

WYNIKI TESTU ŚCIERALNOŚCI CZĄSTEK

WYNIK	TESTU
Test uwalniania cząstek stałych Helmke Drum	≥0,5 Qm (zliczeń/cm²) <1700

WYNIKI METODY TESTOWANIA ASTM F739-12

LEK	Średni czas przenikania (MBT), minuty Breakthrough of the test chemical is deemed to have occurred when the permeation rate has reached 0.1 Qg/cm² /min
CISPLATYNA	>480
KARMUSTYNA	>240
CYKLOFOSFAMID	>480
CHLOROWODOREK DOKSORUBICYN	>480
5-FLUOROURACYL	>480
METROTREKSAT	>480
ETOPOZYD	>480
PAKLITAKSEL	>480
TIOTEPA	>456

Wyniki uzyskane w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych przez akredytowane, zewnętrzne laboratorium testowe. *W przypadku Bioclean D i Bioclean 2000 wyniki przenikania substancji chemicznych odnoszą się do wydajności tkaniny wyłącznie w celach informacyjnych. Szwy i zamknięcia mogą mieć krótsze czasy przebicia. Zalecamy zakładanie na kombinezon odzieży z uszczelnionymi szwami, takiej jak Bioclean-C, w celu zapewnienia dodatkowej ochrony przed lekami stosowanymi w chemioterapii.

TABELA ROZMIARÓW

Rozmiar: S: Klatka piersiowa: 84-92 cm (33"-36"), wzrost: 164-170 cm (5'4"-5'6")
Rozmiar: M: Klatka piersiowa: 92-100 cm (36"-39"), wzrost: 170-176 cm (5'6"-5'9")
Rozmiar: L: Klatka piersiowa: 100-108 cm (39"-42"), wzrost: 176-182 cm (5'9"-6'0")



Fartuch BioClean-C™ BCDA

WYNIKI TESTU WYDAJNOŚCI MATERIAŁÓW

WYNIK	TESTU	KLASA WYDAJNOŚCI
Odporność na ścieranie	>10 cycles	1
Odporność na przekłucie	>5 N	1
Odporność na rozdzielanie (metoda trapezowa), w kierunku poprzecznym (CD)	>10 N	2
Odporność na rozdzielanie (metoda trapezowa), w kierunku wzdłużnym (MD)	>10 N	3
Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku poprzecznym (CD)	>30 N	1
Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wzdłużnym (MD)	>30 N	2
Odporność na działanie cieczy - 30% H ₂ SO ₄	>90%	3
Odporność na działanie cieczy - 10% NaOH	>90%	3
Odporność na działanie cieczy - o-Xylene	>90%	2
Odporność na działanie cieczy - Butan-1-ol	>90%	3
Penetracja cieczami - 30% H ₂ SO ₄	<1%	3
Penetracja cieczami - 10% NaOH	<1%	3
Penetracja cieczami - o-Xylene	<1%	3
Penetracja cieczami - Butan-1-ol	<1%	3
Wytrzymałość szwów ¹	>50 N	2

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

	ROZMIAR	Fartuch BioClean-C do zastosowań w chemioterapii
BCDA	NR DO PONOWNEGO ZAMÓWIENIA	BCDA-S, BCDA-M, BCDA-L

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem www.ansell.com lub kontaktując się z nami przy użyciu poniższych danych:

Region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Azja i Pacyfik

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Ameryka Północna

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Ameryka Łacińska i Karaibów

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Zgodność z normami wydajności i regulacjami

CE 0598



TYPE PB [6]



PARTIAL BODY PROTECTION ONLY



TYPE PB [4]

UK
CA

Ansell, ® i ™ są znakami towarowymi spółki Ansell Limited lub jednego z jej podmiotów powiązanych. Patenty USA oraz oczekujące patenty USA i inne: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejszy dokument i zawarte w nim inne oświadczenia złożone przez firmę Ansell lub w jej imieniu nie stanowią gwarancji użyteczności handlowej żadnego z produktów firmy Ansell ani ich przydatności do określonego celu. Firma Ansell nie ponosi odpowiedzialności za przydatność i adekwatność wybranych przez użytkownika rękawic do konkretnego celu.

Sprawdź pakiet weryfikacji produktu lub skontaktuj się z działem obsługi firmy Ansell, aby uzyskać konkretne informacje na temat stosowania odzieży z lekami cytotoksycznymi. Odzież stosowana do ochrony przed takimi lekami musi zostać dopasowana do specyficznych substancji chemicznych w użyciu.

Ansell